

FLUKE®

Biomedical

190M Series III

Medical ScopeMeter

Models 190M-2-III, 190M-4-III

用户手册



FBC-0124 September 2021 Rev. 1 (Simplified Chinese)

© 2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

保修和产品支持

Fluke Biomedical 保证本仪器自原始采购之日起一年内无材料和工艺上的缺陷。在保修期内，对经证实存在故障的产品，我们将选择予以免费修理或更换，但用户要负责将产品送回 **Fluke Biomedical** 并预付运费。本项保证仅适用于原购买者并且不得转让。如果产品因意外或误用造成损坏，或者由经 **Fluke Biomedical** 授权的服务中心之外的任何人进行修理或改造，则本保证不适用。除此以外，**Fluke** 不作其它任何明示或隐含的保证，例如适用于某一特殊目的的隐含保证。**FLUKE** 对任何特殊、间接、偶发或后续的损坏或损失概不负责，包括由于任何原因或推理引起的数据丢失。

本保证只涵盖带有清晰序列号标牌的序列化产品及其附件。仪器的重新校准不在本保证范围之内。

本保证赋予您特定的法律权利，而且您可能还拥有其它权利，这会因司法管辖区域不同而有所差异。由于某些司法管辖区域不允许将隐含保证或偶发或后续损失排除在外，或加以限制，本责任限制或许对您不适用。若本保证的任何条款被法庭或其它具有司法管辖权的决定者裁定为不适用或不可执行时，该项裁定将不影响其它条款的有效性或执行性。

通告

保留所有权利

©2021 Fluke Biomedical 版权所有。未经 Fluke Biomedical 书面同意，不得对本出版物的任何部分进行复制、传播、转录、存于可检索系统中，或译成任何其它语言。

版权让渡

Fluke Biomedical 同意提供有限的版权让渡，以便您复制手册和其它印刷材料，用于服务培训课程和其它技术出版物的目的。如果您需要复制或分发其它材料，请向 Fluke Biomedical 提交书面申请。

开箱与检验

在收到仪器时，请遵照标准的收货惯例进行处理。检查运输包装箱是否有损坏。如果发现损坏，则不要开箱。通知承运人并要求其委派一位代理人到达开箱现场。虽没有特殊的开箱指示，但应注意不要在开箱时损坏仪器。检查仪器是否存在物理性损坏，例如零部件弯曲或破裂、有凹痕或划痕。

技术支持

若需应用支持或解答技术方面的疑问，请发送电子邮件至 techservices@flukebiomedical.com 或拨打 1-800-850-4608 或 1-440-248-9300。欧洲客户请发送电子邮件至 techsupport.emea@flukebiomedical.com 或拨打 +31-40-2675314。

索赔

我们通常委托公共承运人负责运输，交货条款为产地离岸价。在交付时，若发现物理性损坏，请将所有包装材料保留原状并立即联系承运人，以便提交索赔。如果仪器交付时物理状态良好，但不能在规格内工作，或者存在任何其它不是由运输损坏引起的问题，请与 Fluke Biomedical 或当地的销售代表联系。

退货和维修

退货程序

所有退货的产品（包括所有保修索赔货物）必须发送到我们的工厂所在地并预付运费。在将仪器退还给 Fluke Biomedical 时，我们建议使用美国邮政服务、联邦快递或 Air Parcel Post。我们还建议以实际的置换价格给货物购买保险。对于货物丢失或因包装不良或操作不当而导致收到的仪表受损，Fluke Biomedical 概不负责。

运输时应使用原始的包装箱和包装材料。如果无法这样做，我们建议在重新包装时遵守下列指南：

- 使用足以承受运输货物重量的双层纸箱。
- 使用硬纸皮或纸板保护所有仪器表面。用非研磨性材料将所有突出的部位包住。
- 使用至少 4 英寸厚包装密实的、行业认可的减震材料来包裹仪器。

享受部分退款 / 记账的退货产品：

每件要求退款 / 记账的退货产品必须有一个退料审查编号 (RMA)，您可致电我们公司的订单录入组获取，电话 1-440-498-2560。

维修和校准：

要查找最近的服务中心，请浏览 www.flukebiomedical.com/service 或者通过以下方式联系：

美国亚洲：

Fluke Biomedical

电话：1-833-296-9240

电子邮件：globalcal@flukebiomedical.com

欧洲、中东和非洲：

Eindhoven Calibration Lab

电话：+31-40-2675300

电子邮件：servicedesk@fluke.nl

为保证分析仪保持最高的准确度，Fluke Biomedical 建议至少每 12 个月校准一次。校准必须由有资质的人员执行。有关校准事宜，请联系当地的 Fluke Biomedical 代表。

认证

本仪器经过全面测试和检验。经检验证实，从工厂发运时，本仪器符合 **Fluke Biomedical** 的制造规范。校准测量值可溯源至美国国家标准与技术研究所 (NIST)。对于没有 NIST 校准标准适用的设备，均采用公认的测试规程依照内部性能标准进行测量。

警告

用户未经授权自行改动仪器或在超出所公布规格的条件下使用仪器，均可能导致电击危险或仪器工作异常。对于任何因自行改动设备而导致的伤害，**Fluke Biomedical** 概不负责。

责任和限制

本文档所含的信息会随时更改，且不代表 **Fluke Biomedical** 的承诺。对本文档信息的更改将并入新版本的出版物中。对于不是由 **Fluke Biomedical** 或其附属经销商提供的软件，**Fluke Biomedical** 对其使用或可靠性不承担任何责任。

制造地点

190M Series III Medical ScopeMeter 生产地址为：Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, U.S.A。

目录

标题	页码
简介	1
请联系 Fluke Biomedical	2
安全须知	2
技术指标	2
打开测试仪套件	2
如何使用测试仪	4
测试仪电源	4
测试仪重置	4
菜单	5
按键照明	6
输入连接	7
示波器	7
探针类型设置	8
输入通道选择	9
利用 Connect-and-View™ 功能查看未知信号	9
自动示波器测量	10
冻结屏幕	11
平均、余辉及突波捕获功能	11
使用平均执行波形平滑处理	11
智能平均	12
余辉、包络和采样点连线以查看波形	12
突波显示	13
高频噪声抑制	13
波形采集	14
设置采集速度和波形存储深度	14
交流耦合选择	14
反转所显示波形的极性	15
可变输入灵敏度	15
噪声波形	16
数学功能 +、-、x、XY- 模式	16
数学功能频谱 (FFT)	17
波形比较	18

通过-失败测试.....	20
波形分析.....	20
万用表自动测量 (190M-4-III).....	20
万用表测量选择.....	20
相对万用表测量.....	21
万用表测量 (190M-2-III).....	23
万用表接头.....	23
电阻值测量.....	23
电流测量.....	24
自动 / 手动量程选择.....	25
相对万用表测量.....	26
记录器功能.....	27
记录器主菜单.....	27
波形趋势图 (TrendPlot™).....	27
TrendPlot 功能.....	27
记录的数据显示.....	28
记录器选项.....	28
关闭 TrendPlot 屏幕.....	29
在深层存储器中记录示波器波形（示波器记录）.....	29
启动示波器记录功能.....	29
记录的数据显示.....	30
单扫描模式下的示波器记录.....	30
通过触发以开始或停止示波器记录.....	30
TrendPlot 或示波器记录分析.....	31
重放、缩放及光标功能.....	31
重放 100 个最近的示波器屏幕.....	32
重放详解.....	32
连续重放.....	33
关闭重放功能.....	33
自动捕获 100 个间歇性信号.....	33
放大波形.....	33
光标测量.....	34
波形上的水平光标.....	34
波形上的垂直光标.....	35
在数学处理 (+ - x) 波形上使用光标.....	36
在频谱测量中使用光标.....	36
上升时间测量.....	37
波形触发器.....	38
触发电平和边沿.....	38
触发延时或预触发.....	39
自动触发选项.....	40
边沿触发.....	41
噪声波形触发器.....	41
单个事件采集.....	42
N 个周期触发器.....	42

外部波形触发 (190M-2-III)	43
脉冲触发器	44
窄脉冲	44
脉冲缺失	45
存储器和 PC	46
USB 端口	46
USB 驱动程序	47
保存和调用	47
保存包含关联设置的屏幕	49
所有存储器都在使用中	49
编辑名称	50
以 .bmp 格式保存屏幕（打印屏幕）	50
删除包含关联设置的屏幕	51
调用包含关联设置的屏幕	51
调用设置配置	52
查看存储的屏幕	52
重命名存储的屏幕和设置文件	53
复制/移动存储的屏幕和设置文件	53
FlukeView™ 2 软件	54
计算机连接	54
WiFi 连接	55
提示	56
标准配件	56
独立浮动隔离输入	57
倾斜支架	61
Kensington® 锁	62
挂带	62
重置测试工具	62
语言设置	63
亮度	63
日期和时间	63
电池电量	64
关机定时器	64
显示屏自动关闭定时器	64
自动设置选项	65
维护	66
存储	66
锂电池组	66
给电池充电	67
电池组更换	68
电压探针校准	70
版本和校准信息	71
电池信息	72
替换零件	72
可选配件	73
故障排除	75

简介

Medical ScopeMeter 190M Series III（以下简称“产品”或“测试仪”）是高性能手持式示波器，用于排除工业电气或电子系统的故障。本手册内的描述和说明适用于所有型号。可用版本包括：

- **190M-2-III**

两个 200 MHz 示波器输入端口 (BNC)，一个万用表输入端口（香蕉插口）

- **190M-4-III**

四个 200 MHz 示波器输入端口 (BNC)

大多数图例中所示的是 190M-4-III 版本。

只有 190M-4-III 版本包括输入端口 C 和输入端口 D 以及输入端口 C 和输入端口 D 选择键（ 和 ）。

请联系 Fluke Biomedical

Fluke Corporation 在全球范围内运营。如需获取本地联系信息，请访问我们的网站：

www.flukebiomedical.com。

要注册您的产品或查看、打印、下载最新的手册或手册补遗，请访问我们的网站。

Fluke Biomedical

P.O.Box 9090

Everett, WA 98206-9090

1-800-850-4608（美国免费电话）

1-440-498-2575（国际电话）

sales@flukebiomedical.com

安全须知

在本产品随附的《安全须知》文件（印刷版）中以及网站 www.flukebiomedical.com 上均提供了“一般安全须知”。在适用的情况下，还会列出一些更具体的安全须知。

技术指标

有关完整技术指标，请访问 www.flukebiomedical.com。请参阅 *190M Series III 产品技术指标*。

打开测试仪套件

表 1 按型号列出了产品套件所含的物品。

注意

您收到的套件尚未安装电池。有关更多信息，请参见[电池组更换](#)。新的充电锂电池并未完全充满电。请参见[给电池充电](#)。

表 1. 套件：190M III 型号

项目	说明	190M-2-III	190M-4-III
1	带手提带的测试仪	•	•
2	挂带	•	•
3	BC190/830 型电源适配器 / 充电器	•	•
4	通用电源线组	•	•
5	BP290 锂电池，单节	•	
6	BP291 锂电池，两节		•
7	TL175 测试引线组	•	
8	VPS410-II-x 电压探针 500 MHz，10:1	2	4
9	用于连接 PC 的 USB 接口线 (USB-A 转 mini-USB-B)	•	•
10	安全须知	•	•
11	FlukeView 2 演示软件和安装说明	•	•
12	FlukeView 软件，适用于 Windows 激活密钥（将 FlukeView 2 演示版转换为全功能版）。	•	•
13	CXT293 便携保护箱	•	•
14	WiFi 适配器 (DWA131)	•	•
15	MA190 医疗应用附件包	•	•

如何使用测试仪

本节按操作步骤介绍了测试仪的示波器功能和万用表功能。本节内容并未覆盖全部功能，只提供了一些基本示例来说明如何使用菜单以及如何执行基本操作。

测试仪电源


请参见图 1，了解如何从标准交流电源插座为测试仪供电。请参见 [电池电量](#) 中关于使用电池供电的说明。

使用 ① 打开测试仪。

测试仪会按照最近设置的配置进行启动。

当测试仪首次通电时，会自动打开用于调节日期、时间和信息语言的菜单。

图 1. 启动测试仪

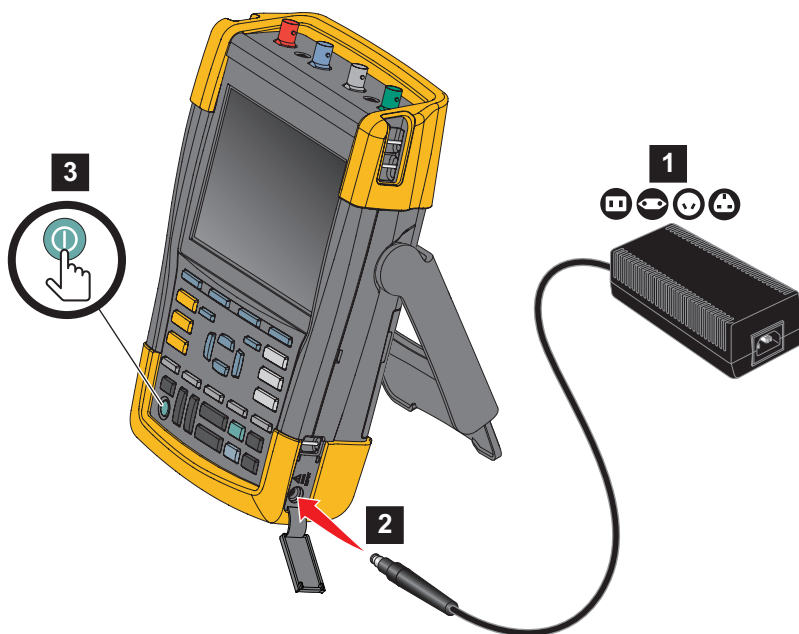

测试仪重置

将测试仪恢复为出厂设置：

1. 关闭测试仪。
2. 按住 **USER**。
3. 按下并释放 ①。

测试仪打开。等待听到两声表示重置成功的嘟嘟声。

4. 释放 **USER**。

菜单


当您打开测试仪时，示波器菜单是默认菜单。以下示例介绍如何使用菜单来选择功能。

要打开示波器菜单并选择项目：

- 1. 按 **SCOPE**，屏幕底部附近会显示定义四个蓝色功能键当前作用的标签。
- 2. 打开“波形选项”菜单。

该菜单显示在屏幕底部。实际设置显示在黄色背景中。使用光标更改设置（黑色背景）并使用 **ENTER** 确认选择。请参见图 2。

图 2. 基本导航

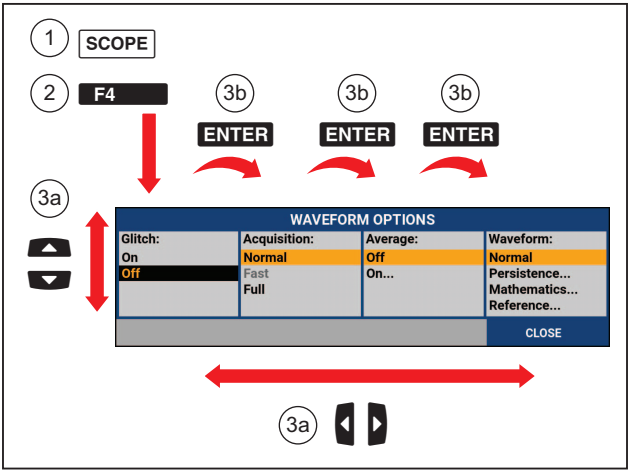

- 3. 使用蓝色箭头键突出显示该项。
 - 4. 按 **ENTER** 确定选择。
- 然后将选择下一个选项。完成最后一个选项的选择后，菜单将会关闭。

注意

要退出菜单，可随时按“关闭”。

- 5. 按 **BACK** 关闭菜单。

按键照明

有些键配有一个 LED 照明灯。有关 LED 功能的解说，请参见表 2。


表 2. 按键

项目	说明
	亮起：显示屏关闭，测试仪正在运行。请参见 显示屏自动关闭定时器 。 熄灭：所有其他情况
	亮起：测量停止，屏幕冻结。（保持） 熄灭：测量正在进行中。（运行）
   	亮起：量程键、上移 / 下移键以及 F1-4 键的标签，适用于点亮的通道键。 熄灭：-
	亮起：手动操作模式。 熄灭：自动操作模式，可优化波形位置、量程、时基和触发 (Connect-and-View™)
	亮起：信号被触发 熄灭：信号未被触发 闪烁：等待触发器处于“单稳态”或“触发时”波形刷新状态。

输入连接

测试仪顶部有四个安全 BNC 信号输入端口（型号 190M-4-III），或者两个安全 BNC 输入插口和两个安全 4-mm 香蕉输入插口（型号 190M-2-III）。这些隔离型输入端口允许对每路输入进行独立的浮动测量。香蕉输入插口（型号 190M-2-III）可用于 DMM 测量，也可用作示波器模式的外部触发输入端口。请参见图 3。

图 3. 测量连接

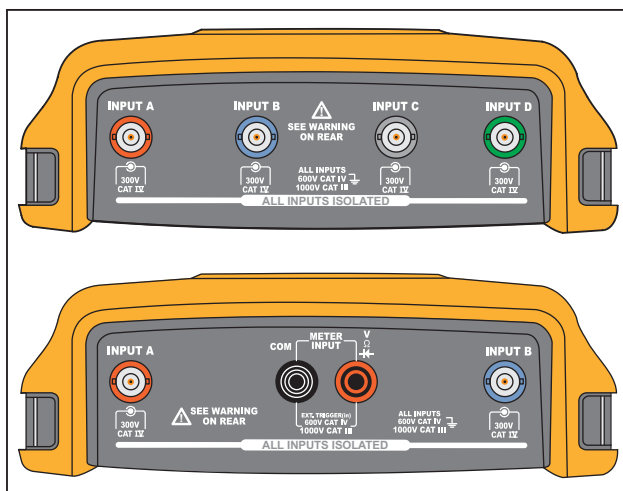

注意

为了最大限度地发挥独立隔离浮动输入端口的优势，并避免因不当使用而引起的问题，请参见提示。

为了准确地指示测量信号，探针与测试仪上的输入通道必须匹配。


使用并非本产品附带的探针时，请参阅电压探针校准。

示波器

要进行示波器测量：

1. 将红色电压探针连接到输入端口 A，蓝色电压探针连接到输入端口 B，灰色电压探针连接到输入端口 C，绿色电压探针连接到输入端口 D。
2. 将每个电压探针的短接地线连接到其自身的参考电位。请参见图 4。

图 4. 示波器连接

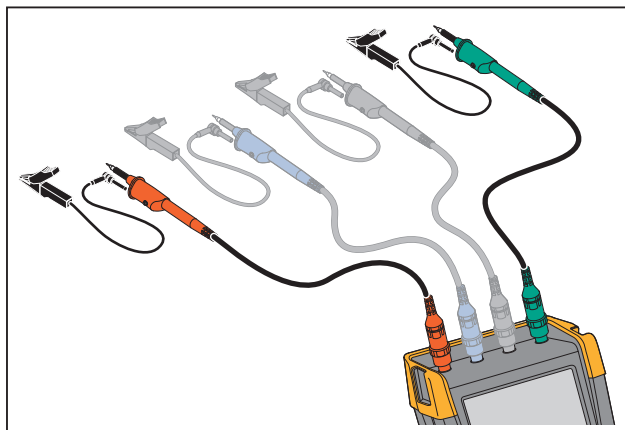**⚠️ 警告**

为防止触电，在连接 **VPS410** 探针套件时，如果没有钩式夹或接地簧片，请使用绝缘套管。

探针类型设置

为了获得正确的测量结果，测试仪探针类型的设置值必须与相连探针的类型相对应。

要选择输入端口 **A** 的探针设置：

1. 按 **[A]** 显示“输入端口 **A**”键标签。
2. 按 **[F3]** 打开“探针开启 **A**”菜单。
3. 使用光标和 **[ENTER]** 选择探针类型的电压、电流或温度。
 - a. 电压：选择电压探针衰减系数。
 - b. 电流和温度：选择电流探针或温度探针灵敏度。

输入通道选择

要选择输入通道：

1. 按下所需通道键 (A-D)：

- 通道被打开。
- 通道按键照明被打开

2. 如果通道键亮起， 和  此时将被分配到所指示的通道。

为了将多个通道设置为同一量程 (V/格)，比如与输入端口 A 相同的量程，请执行下列操作：

1. 为所有的相关通道选择输入端口 A 的测量功能、探针设置及输入选项。
2. 按住 。
3. 按  和/或  和/或 。
4. 松开 。

注意所有被按下的键此时都会亮起。

 和  适用于所有相关的输入通道。

利用 Connect-and-View™ 功能查看未知信号

Connect-and-View™ 功能使测试仪能够自动显示复杂的未知信号。该功能可以优化位置、量程、时基及触发性，可确保稳定显示几乎任何波形。如果信号改变，则设置值会自动调整，以保持最佳显示效果。该功能尤其适合快速检查多个信号。


若要在测试仪处于手动模式时启用 Connect-and-View 功能：

1. 按  执行自动设置。屏幕的右上方会出现“自动”，并且按键灯熄灭。

底部行将显示量程、时基及触发器信息。波形标识符 (A) 显示在屏幕右侧。请参见图 5。屏幕左边的输入端口 A 零位图标 - 指示该波形的地电位。

2. 再次按下 ，以重新选择手动量程。屏幕的右上方会出现“手动”，并且按键灯亮起。

图 5. 完成自动设置后的屏幕

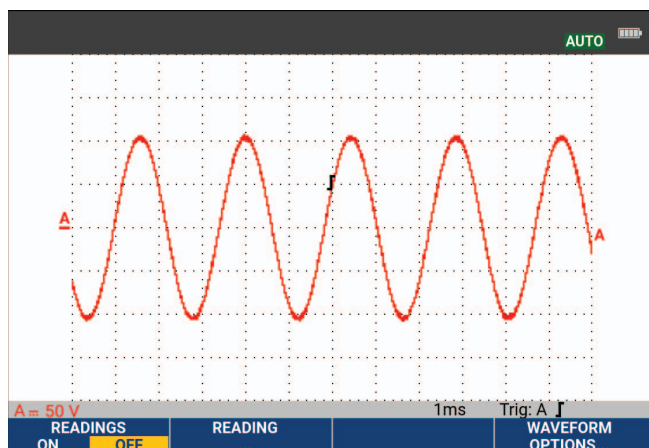

使用键盘底部的   手动更改波形视图。

自动示波器测量

该测试仪能进行各种示波器自动测量。除了波形之外，还可以显示四个数字读数：读数 1 - 4。这些读数可以独立选择，可以在输入端口 A、输入端口 B、输入端口 C 或输入端口 D 的波形上进行测量。

若要为输入端口 A 选择“峰间值”测量，请执行下面的步骤：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F2** 打开**读数**菜单。
3. 选择编号 **F1** 的读数，例如**读数 1**。
4. 使用光标和 **ENTER** 选择**开启 A**。注意，突出显示将跳至当前测量值。
5. 使用光标和 **ENTER** 选择 **Hz** 测量值。


注意，屏幕的左上角会显示 Hz 测量。请参见图 6。

若要为输入端口 B 选择频率测量作为第二个读数：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F2** 打开**读数..**菜单。
3. 选择编号 **F1** 的读数，例如**读数 2**。
4. 使用光标和 **ENTER** 选择**开启 B**。注意，突出显示将跳至测量值字段。
5. 使用光标和 **ENTER** 打开“峰值”菜单。
6. 使用光标和 **ENTER** 选择“峰间值”测量。

图 6 显示了一个双读数屏幕的示例。选择两个以上的读数时，字符将会变小。

图 6. 选择 Hz 和 V 峰间值作为示波器读数

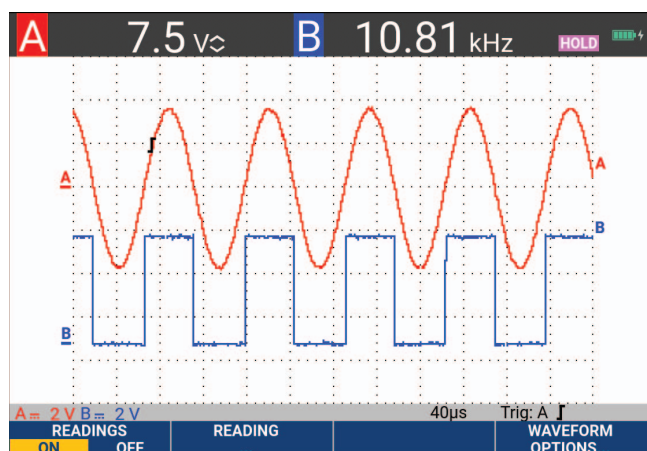

冻结屏幕

您可以随时冻结屏幕（所有的读数和波形）。

1. 按 **HOLD RUN** 冻结屏幕。“保持”键显示在读数区域的右侧。该键的照明亮起。
2. 再次按 **HOLD RUN** 可恢复测量。该键的照明熄灭。

平均、余辉及突波捕获功能

使用平均执行波形平滑处理

要使波形变得平滑：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用 **◀ ▶** 跳至平均：。
4. 使用光标和 **ENTER** 选择开启... 以打开“平均”菜单。
5. 使用光标和 **ENTER** 选择平均因数：平均 64。这表示将对 64 个采集结果求平均值。


6. 使用光标和 **ENTER** 选择**平均：常规**（常规平均）或“智能”（智能平均，见下文）。

您可以使用平均功能来抑制波形中随机的或不相关的噪声，而不会损失频宽。平滑前后的波形如图 7 所示。

智能平均

在常规平均模式中，波形中的随机偏差只会扭曲平均波形，不会清楚地显示在屏幕上。在信号真正发生变化时，比如在您探测周围区域时，需要相当长的时间才能使新波形稳定下来。而在采用智能平均模式时，您可以快速地探测周围区域，偶尔的波形变化（比如视频中的水平回扫）也会立即显示在屏幕上。

图 7. 波形平滑处理

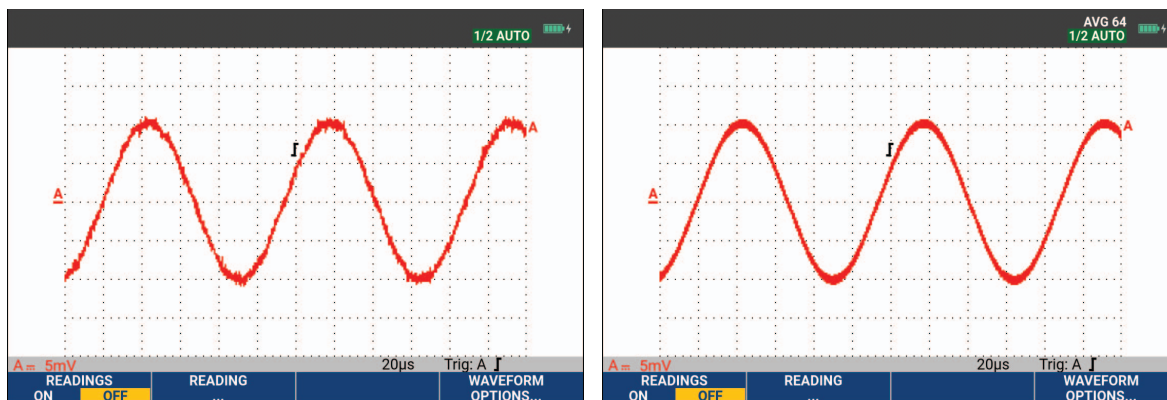


余辉、包络和采样点连线以查看波形

您可以利用“余辉”功能来观察动态信号。请参见图 8。

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**波形：** 并打开“余辉...”菜单。
4. 使用光标和 **ENTER** 选择：
 - a. 数字余辉：短、中、长或无限，用于观察动态波形（类似于在一个模拟示波器上）。
 - b. 数字余辉：关，显示：包络，用于查看动态波形的上下边界（包络模式）。

- c. 显示采样点连线：关，用于仅显示测量的样品。采样点连线关闭功能可用于测量调制信号或视频信号等。
- d. 显示屏：常规，用于关闭包络模式而打开采样点连线功能。

图 8. 利用“余辉”功能来观察动态信号

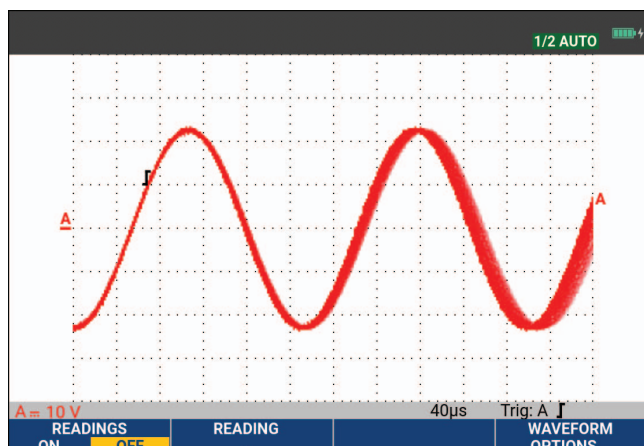

突波显示

要捕获波形上的突波：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 选择**突波：开启**。
4. 按 **F4** 退出菜单。

您可以使用该功能来查看 8 ns（8 纳秒，依据 ADC 125 MS/s 采样速率）的事件（突波或其他异步波形），或者查看高频调制波形。

默认情况下，**突波检测**处于打开状态。转至**用户选项**以更改自动模式的首选项。

选择“2 mV/ 格”量程时，“突波检测”功能将会自动关闭。在“2 mV/ 格”量程中，您可以手动设置“启用突波检测”。

高频噪声抑制

关闭突波检测（突波：关闭）将抑制波形上的高频噪声。平均功能将会进一步抑制噪声。

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。

3. 使用光标和 **ENTER** 选择**突波：关闭**，然后选择**平均：开启...**以打开“平均”菜单。

4. 使用光标和 **ENTER** 选择**平均 8**。

请参见 [使用平均执行波形平滑处理](#)。

突波捕获与平均功能不会影响频宽。还可以利用频宽限制滤波器进一步抑制噪声。请参见 [噪声波形](#)。

波形采集

设置采集速度和波形存储深度

要设置采集速度，请执行下列操作：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 选择**采集：**。
 - a. 快速 – 快速的波形刷新率；最短的记录长度、减小的缩放比例、无读数。
 - b. 完全 – 最详细的波形；10 000 个样本/波长记录长度、最大的缩放比例、较低的波长刷新率。
 - c. 常规 – 最佳的波长刷新率与缩放范围组合。
4. 使用 **F4** 退出菜单。

有关所有型号的记录长度，请访问 fluke.com.cn 查看 *190 Series III 产品规格*。

交流耦合选择

测试仪重置之后可以进行直流耦合，以使交流和直流电压显示在屏幕上。利用交流耦合功能来观察直流信号上方的小交流信号。

要选择交流耦合，请执行下列操作：

1. 按 **A** 显示“输入端口 A”键标签。
2. 按 **F2** 突出显示**交流**。

注意，屏幕左下角会显示交流耦合图标：。

您可以定义“自动设置”如何影响此设置，请参见 [自动设置选项](#)。

反转所显示波形的极性

要反转极性，比如输入端口 A 波形，请执行下列操作：

1. 按  显示“输入端口 A”键标签。
2. 按  打开“输入端口 A”菜单。
3. 使用光标和  选择**反转**并确定反转波形显示。
4. 使用  退出菜单。

比如，负向波形是正向波形时，或许可以提供更有意义的视图。反转显示通过波形右侧以及波形下方状态行中的一个反转波形标识符 () 进行标识。

可变输入灵敏度

可变输入灵敏度让您连续地调整任何输入灵敏度，比如将基准信号的振幅设为准 6 格。一个量程的输入灵敏度最多可提高 2.5 倍，比如在“10 mV/ 格”量程的“10 mV/ 格”与“4 mV/ 格”之间进行调整。

要使用可变输入灵敏度（比如输入端口 A），请执行下列操作：

1. 应用输入端口信号。
2. 按  执行自动设置（屏幕顶部显示“自动”）。

自动设置将会关闭可变输入灵敏度。现在您可以选择所需的输入量程。请牢记，您开始调整可变灵敏度时灵敏度会增加（显示的波形振幅会增加）。

3. 按  显示“输入端口 A”键标签。
4. 按  打开“输入端口 A”菜单。
5. 使用光标和  选择并确定**可变**。
6. 使用  退出菜单。

A Var 显示在屏幕的左下方。选择**可变**会关闭光标和自动输入量程。

7. 按下  可增加灵敏度，按下  可降低灵敏度。

注意

可变输入灵敏度在“数学”功能（+ - x 及频谱）中不能使用。

噪声波形

为了抑制波形中的高频噪声，您可以将工作频宽限制为 10 kHz 或 20 MHz。该功能可对所显示的波形进行平滑处理。出于同样的原因，它还能改善波形的触发性。

要在输入端口（比如输入端口 A）上选择 10 kHz 频宽，请执行下列操作：

1. 按 **A** 显示“输入端口 A”键标签。
2. 按 **F4** 打开“输入端口 A”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**频宽：**，然后选择 **10kHz** 以确定频宽限制。

注意

为了抑制噪声而不损失频宽，可以使用平均功能或关闭**显示突波**功能。

数学功能 +、-、x、XY-模式

您可以加 (+)、减 (-) 或乘 (x) 两个波形。该测试仪显示数学处理波形及源波形。XY- 模式能以一个输入值作为垂直轴、另一个输入值作为水平轴进行绘图。数学功能可以在相关波形上进行点对点操作。

要使用数学功能，请执行下列操作：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER**：
 - a. 突出显示**波形：**
 - b. 选择**数学...**以打开数学。
 - c. 选择**功能：** +、-、x 或 XY-模式。
 - d. 选择第一个波形：**源 1：A、B、C 或 D。**
4. 选择第二个波形：**源 2：A、B、C 或 D。**

显示屏上会显示数学功能的键标签。

5. 按：
 - a. **F2** -   可选择比例因子，使处理波形适应显示屏。
 - b. **F3** -   可向上或向下移动处理波形。
 - c. **F4** - 打开或关闭处理波形。

数学处理波形的灵敏度范围等于灵敏度范围内最低的输入值除以比例因子。

数学功能频谱 (FFT)

频谱功能用输入波形的颜色显示输入端口 A、B、C 或 D 波形的频谱特性。它通过 FFT（快速傅里叶变换）将振幅波形从时域转换为频域。为了减少旁瓣（泄漏）的影响，建议使用“自动开窗”。这会自动使所分析的部分波形与一个完整的周期数相适应。选择汉宁窗、海明窗或不开窗可使刷新率变快，但也将产生更多泄漏。确保整个波形的振幅保持在屏幕上。


要使用频谱功能，请执行下列操作：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER**：
 - a. 突出显示**波形**：
 - b. 选择**数学...**以打开数学。
 - c. 选择**功能：频谱**。
 - d. 选择**窗口：自动**（自动开窗）、**汉宁**、**海明**或**无**（不开窗）。

注意，屏幕右上角会显示“频谱”。请参见图 9。如果显示“振幅偏低”，则无法进行频谱测量，因为波形的振幅过低。如果显示“错误时基”，说明时基设置不能使测试仪显示 FFT 结果。结果或者因过慢而导致混乱，或者因过快而导致屏幕信号不到一个周期。

4. 按 **F1** 对波形 A、B、C 或 D 进行频谱分析。
5. 按 **F2** 将水平振幅的比例设为线性或对数形式。
6. 按 **F3** 将垂直振幅的比例设为线性或对数形式。
7. 按 **F4** 关闭或打开频谱功能。

图 9. 频谱测量

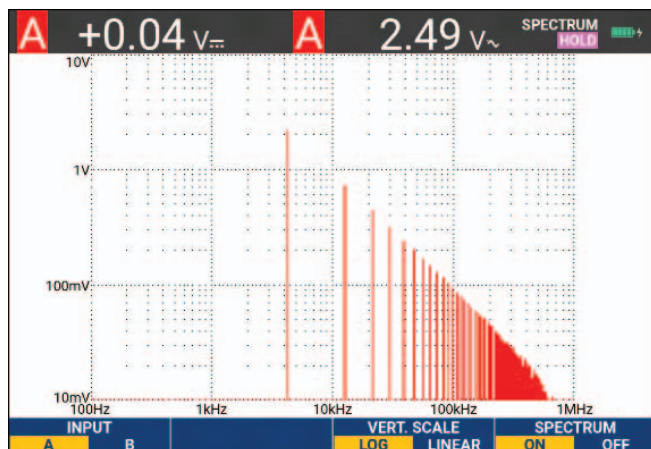

波形比较

您可以显示一个固定的基准波形与实际的波形作视觉比较。


要建立一个基准波形并将其与实际波形一同显示，请执行下列步骤：

1. 按 **SCOPE** 显示示波器键标签。
2. 使用 **F4** 打开“波形选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER**：
 - a. 突出显示**波形**。
 - b. 选择**基准**以打开“波形基准”菜单。
 - c. 选择**打开**以显示基准波形。
其中可以是：
 - 最近使用的基准波形（如果不可用，则不会显示基准波形）。
 - 包络波形，前提是余辉功能“包络”已打开。
 - d. 选择**调用**，从存储器中调用一个保存的波形（或波形包络），然后将其用作基准波形。
 - e. 选择**新建**以打开“新建基准”菜单。

如果选择了**新建**，则继续执行第 4 步操作，否则请执行第 5 步。

4. 使用   选择要添加至瞬时波形的附加包络的宽度。
5. 按 **ENTER** 保存瞬时波形并永久显示以供参考。该画面会同时显示实际波形。
要从存储器中调用已保存的波形并将其用作基准波形，请参阅 [调用包含关联设置的屏幕](#)。

拥有 ± 2 个像素的附加包络的基准波形示例：

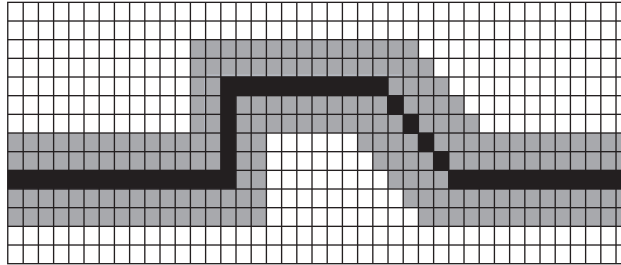

黑色像素：基本波形

灰色像素： ± 2 个像素包络

显示屏上的 1 个垂直像素为 $0.04 \times \text{量程} / \text{格}$

显示屏上的 1 个水平像素为 $0.04 \times \text{时间} / \text{格}$

通过-失败测试

您可以利用一个基准波形作为实际波形的测试模板。如果至少有一个波形样本超出测试模板，则会存储通过或失败的示波器屏幕。最多可存储 **100** 个屏幕。如果存储器已满，则会删除第一个屏幕，以便存储新屏幕。通过 - 失败测试最适用的基准波形是波形包络。

要使用具有波形包络功能的“通过-失败”测试：

1. 在显示屏上显示基准波形。请参见 [波形比较](#)。
2. 使用光标和 **ENTER**：
 - a. 突出显示**通过-失败测试**菜单。
 - b. 选择**存储失败**将保存每个示波器屏幕，其中的样本不在基准范围内
 - c. 选择**存储通过**将保存每个示波器屏幕，其中没有超出基准范围的样本

每次保存一个示波器屏幕时，都会发出一声嘟嘟声。有关如何分析保存的屏幕的信息，请参阅 [重放 100 个最近的示波器屏幕](#)。

波形分析

您可以利用分析功能“光标”、“缩放”及“重放”进行详细的波形分析。有关更多信息，请参见 [重放、缩放及光标功能](#)。

万用表自动测量 (190M-4-III)

该测试仪能进行各种万用表自动测量。您可以显示四个大数字读数：**读数 1...4**。这些读数可以独立选择，可以在输入端口 **A**、**B**、**C** 或 **D** 的波形上进行测量。在“万用表”模式下不会显示波形。**10 kHz** 高频抑制滤波器在万用表模式下始终处于启用状态。请参见 [噪声波形](#)

万用表测量选择

要为输入端口 **A** 选择一个电流测量值，请执行下列操作：


1. 按 **METER** 显示“万用表”键标签。
2. 利用 **F1** 打开“读数”菜单。
3. 按 **F1** 选择要显示的读数，例如“读数 1”。

4. 使用光标和 **ENTER**：

- 选择开启 **A**。注意，突出显示将跳至当前测量值上。
- 选择 **A dc** 测量值。
- 选择与相连电流探针相匹配的一个电流探针灵敏度。请参见[探针类型设置](#)。

显示屏将显示图 10 中的屏幕。

图 10. 万用表屏幕

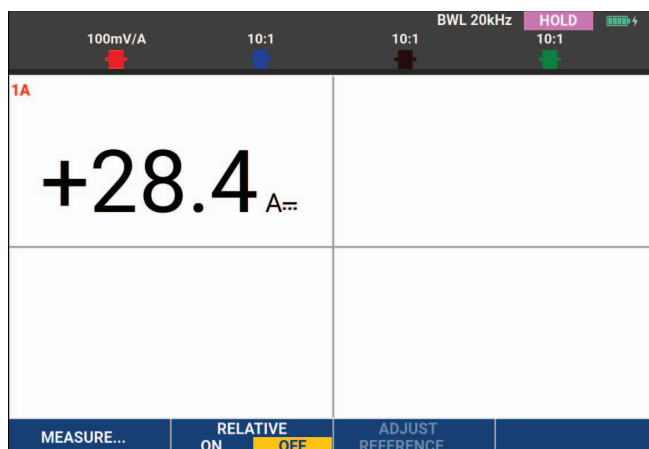

注意

若要过后再更改电流探针灵敏度，请选择另一种测量类型（例如 **Vdc**），然后再次选择“安培”以查看灵敏度菜单。

相对万用表测量

相对测量值显示的是相对于所定义基准值的当前测量结果。下面举例说明了如何测量相对电压。

首先获得一个基准值：


- 按 **METER** 显示“万用表”键标签。
- 测量一个电压作为基准值。
- 按 **F2** 将“相对”设置为开。突出显示“开”。

这样，基准值便保存起来，用作后面所进行测量的基准。观察用于调整基准值的“调整基准”软键 (**F3**)。

4. 测量电压并与基准值比较。

现在大读数是实际输入值与所存储基准值之差。实际输入值显示在大读数的下方 (ACTUAL:xxxx)。请参见图 11。比如您需要监控输入活动（电压、温度）相对于已知良好值的情况时，可以使用该功能。

图 11. 测量相对值

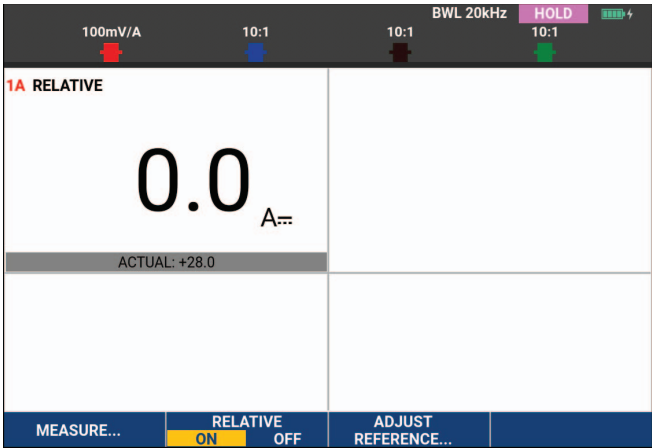

要调整基准值：

1. 按 **F3** 打开“调整基准”菜单。
2. 按 **F1** 选择适用的相对测量读数。
3. 使用 **◀ ▶** 选择要调整的数位。
4. 使用 **▲ ▼** 调整数位。重复上述步骤，直到完成。
5. 按 **ENTER** 使用新的基准值。


万用表测量 (190M-2-III)

屏幕显示万用表输入端口上测量值的数字读数。

万用表接头

使用两个 4-mm 安全红色 (V Ω →) 和黑色 (COM) 香蕉插口输入端口来执行万用表功能。请参见图 12。

图 12. 万用表接头

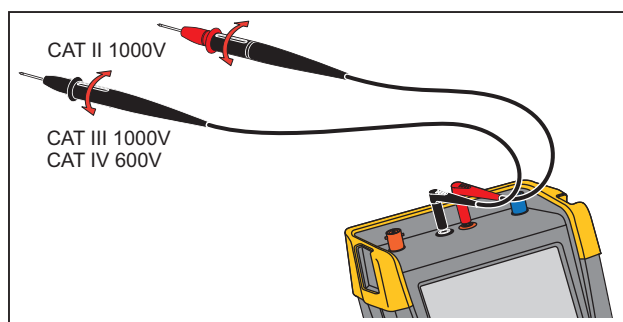


电阻值测量

要测量电阻：

1. 从 4-mm 香蕉插口输入端口将红色和黑色测试线连接到电阻器。
2. 按 **METER** 显示“万用表”键标签。
3. 使用 **F1** 打开“测量”菜单。
4. 使用光标突出显示欧姆。
5. 按 **ENTER** 选择欧姆测量。

电阻值以欧姆为单位显示在显示屏上。注意，条形图也会显示。请参见图 13。

图 13. 电阻值读数

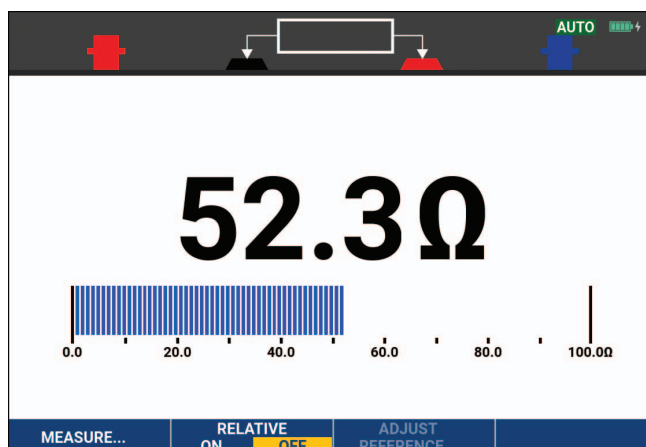

电流测量

在示波器模式和万用表模式下都可以测量电流。示波器模式的优点是在执行测量的同时显示波形。万用表模式的优点是测量分辨率高。

下一个示例介绍万用表模式下典型的电流测量。


⚠️⚠️ 警告

请仔细阅读所用电流探针的相关说明。

要设置测试仪：

1. 在 4-mm 香蕉插口输入端口和要测量的导线之间连接电流探针，例如 Fluke i410（可选）。
2. 确保探针的红色和黑色接头分别与红色和黑色香蕉插口输入端口相对应。请参见图 14。
3. 按 **METER** 显示“万用表”键标签。

图 14. 测量设置

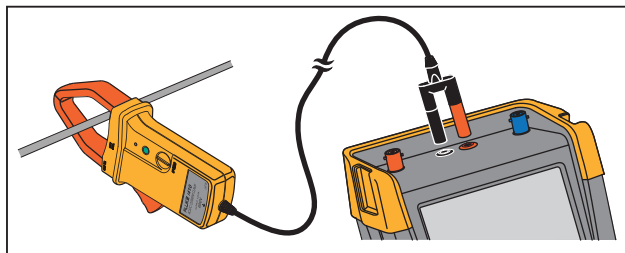

4. 使用 **F1** 打开“测量”菜单。
5. 使用光标突出显示 **A ac**。
6. 按 **ENTER** 打开“电流探针”子菜单。
7. 注意电流探针的灵敏度。使用光标突出显示菜单中相应的灵敏度，例如 **1 mV/A**。


注意

若要过后再更改电流探针灵敏度，请选择另一种测量类型（例如 **Vdc**），然后再次选择“安培”以查看灵敏度菜单。

- 按 **ENTER** 确定电流测量值。

显示屏将显示图 15 中的屏幕。

图 15. 安培测量读数

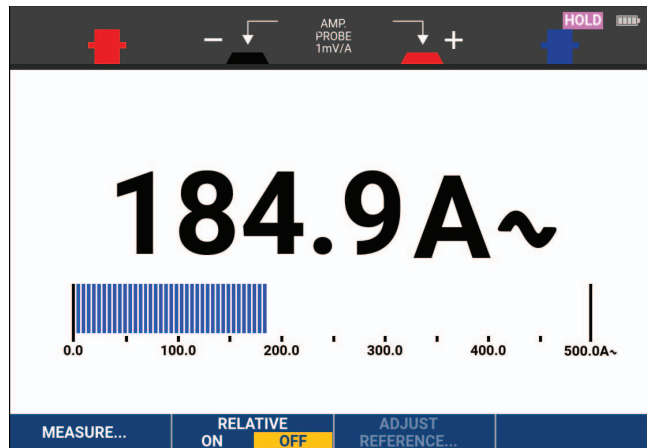

自动/手动量程选择

要启用手动量程，请在万用表测量期间：

- 按 **AUTO** 激活手动量程。
- 使用 **mV** 增大 (V) 或减小 (mV) 量程。

注意条形图灵敏度的变化。使用手动量程功能设置一个固定的条形图灵敏度及小数点。

- 再按 **AUTO** 以选择自动量程。

在自动量程模式下，条形图灵敏度和小数点会自动调整，同时测试仪会检查不同的信号。

相对万用表测量

相对测量值显示的是相对于所定义基准值的当前测量结果。您可以使用该功能监控输入活动（电压、温度）相对于已知良好值的情况。

执行相对电压测量的步骤如下：


1. 获得一个基准值。
2. 按 **METER** 显示“万用表”键标签。
3. 测量一个电压并将其用作基准值。
4. 按 **F2** 将“相对”设置为开。突出显示“开”。

这样，基准值便保存起来，用作后面所进行测量的基准。观察用于调整基准值的“调整基准”软键 (**F3**)。

5. 测量电压并与基准值比较。

现在大读数是实际输入值与所存储基准值之差。条形图指示实际的输入值。实际输入值和基准值显示在大读数的下方 (ACTUAL: xxxx REFERENCE: xxx)。请参见图 16。

图 16. 测量相对值

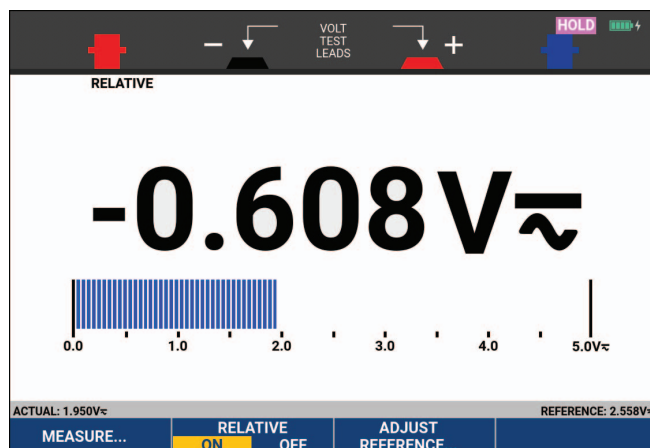

要调整基准值：

1. 按 **F3** 打开“调整基准”菜单。
2. 使用 **◀ ▶** 选择要调整的数位。
3. 使用 **▲ ▼** 调整数位。重复上述步骤，直到完成。
4. 按 **ENTER** 使用新的基准值。

记录器功能

本节按操作步骤介绍了测试仪的记录器功能，并举例说明了如何使用菜单和执行基本操作。

记录器主菜单

首先在示波器或万用表模式下选择一个测量值。然后可以从记录器主菜单中选择记录器功能。

按 **RECORDER** 打开“记录器”菜单。

波形趋势图 (TrendPlot™)

使用 TrendPlot 功能对示波器或万用表的测量值（读数）绘制随时间变化的图形。只有型号 190M-2-III 才有 Trendplot Meter 功能。

注意

因为在 TrendPlot Scope 和 TrendPlot Meter 中的导航操作相同，所以在本手册中只使用 Scope TrendPlot 进行说明。

TrendPlot 功能

请按以下步骤启动 TrendPlot:

1. 利用万用表或示波器自动进行测量，请参见 [自动示波器测量](#)。

在显示屏上绘制读数的趋势图。

2. 按 **RECORDER** 打开“记录器”主菜单。

3. 使用   突出显示趋势图。

4. 按 **ENTER** 开始 TrendPlot 记录。

测试仪将会连续记录测量值的数字读数，并以图形方式显示。TrendPlot 图形从右向左滚动，类似于纸质图表记录器。看到屏幕底部显示从开始以来的记录时间。当前读数显示在屏幕顶部。请参见 [图 17](#)。


5. 按 **F1** 将记录器设置为“停止”以冻结记录器功能。

6. 按 **F1** 将记录器设置为“运行”以重新启动。

注意

对两个读数同时应用 TrendPlot 功能时，屏幕区域将会分成两部分，每个部分含有四格。
对三个或四个读数同时应用 TrendPlot 功能时，屏幕区域将会分成三部分或四部分，每个部分含有两格。

图 17. TrendPlot 读数

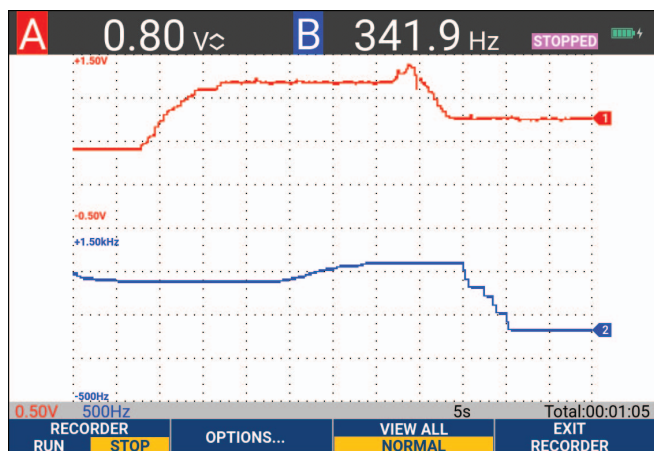

测试仪处于自动模式时，将使用自动垂直刻度适应屏幕上的 TrendPlot 图形。

注意

示波器的 TrendPlot 功能不能用于与光标相关的测量中。或者您也可以使用 PC 软件 *FlukeView™ ScopeMeter™*。

记录的数据显示

在常规视图中（常规），屏幕上只会显示最近记录的 12 格。之前的所有记录都保存在存储器中。

“查看全部”将会显示存储器中的所有数据：

1. 按 **F3** 显示完整波形的概览。
2. 反复按下 **F3**，即可在常规视图（常规）与总览图（查看全部）之间切换。

记录器的存储器存满时，会利用自动压缩算法将所有样本压缩为存储容量的一半，而不会损失暂存区。存储器另一半空间释放后可以继续记录数据。

记录器选项

在屏幕的右下侧，由状态行指示时间。您可以选择使用该时间表示记录起始时间（当前时间）或开始记录后耗用的时间（全部用时）。

要更改时间基准：

1. 按 **F2** 打开“记录器选项”菜单。
2. 使用光标和 **ENTER** 选择当前时间或全部用时。

关闭 TrendPlot 屏幕

按 **F4** 退出记录器功能。

在深层存储器中记录示波器波形（示波器记录）

“示波器记录”功能是一种滚动模式，用以记录每个激活输入端口的长波形。该功能可用于监控移动控制信号或不间断电源 (UPS) 的通电事件等波形。在记录期间将会捕获快速暂态。因为使用了深层存储器，所以可以持续记录许多天。该功能类似于许多 DSO 中的滚动模式，但具有更深层的存储器和更好的功能。


启动示波器记录功能

要记录输入端口（比如输入端口 A 和输入端口 B）的波形：

1. 为输入端口 A 和输入端口 B 施加一个信号。
2. 按 **RECORDER** 打开“记录器”主菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 突出显示示波器记录并开始记录。

波形将会沿着屏幕从右向左移动，与常规图表记录器类似。请参见图 18。

图 18. 记录波形

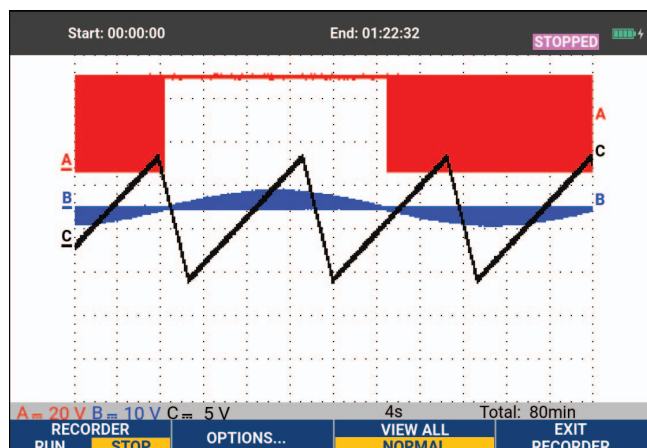

注意，屏幕将显示：

- 屏幕顶部显示全部用时。
- 屏幕底部显示状态，包括“时间/格”设置以及与存储器相对应的总耗时。

注意

为了获得准确的记录，请让测试仪预热至少五分钟。对于长记录，请确保已连接电源。

记录的数据显示

在“常规”视图中，滚动离开屏幕的样本存储在深层存储器中。存储器存满时，将会通过移动其中的数据并删除最早的样本来继续进行记录。

在“查看全部”模式下，存储器中的全部数据都会显示在屏幕上。按下 **F3** 可在**查看全部**（所记录的全部样本总览图）和**常规**视图之间切换。

您可以使用“光标”和“缩放”功能分析所记录的波形。请参见[重放、缩放及光标功能](#)。

单扫描模式下的示波器记录

使用记录器的“单扫描”功能可以在深层存储器已满时自动停止记录。

设置方式：

1. 启动记录模式。请参见[启动示波器记录功能](#)。
2. 按 **F1** 停止记录并解锁**选项**软键。
3. 按 **F2** 打开“记录器选项”菜单。
4. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**模式**字段，选择**单扫描**，然后确定记录器选项。
5. 按 **F1** 开始记录。

通过触发以开始或停止示波器记录

若要记录一个电力故障事件，可通过触发器信号来启动或停止记录：通过触发来开始记录；当深层存储器已满时便会停止记录。未触发时停止，只要在查看全部模式下，下一个触发在 1 格之内，即可继续记录。

- 对于型号 190M-4-III，被选作触发源的 BNC 输入端口上的信号必须要引起触发。
- 对于型号 190M-2-III，应用至香蕉输入插口 (EXT TRIGGER (in)) 的信号必须要引起触发。触发源被自动设为 Ext.（外部）。

设置方式：

1. 启动记录模式。请参见[启动示波器记录功能](#)。
2. 将待记录的信号应用到 BNC 输入端口。
3. 按 **F1** 停止记录并解锁**选项**软键。
4. 按 **F2** 打开“记录器选项”菜单。
5. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**模式**字段，然后选择：
 - a. **触发时** (190M-4-III) 以打开“触发时启动单扫描”菜单
 - b. **在外部** (190M-2-III) 以打开“在外部启动单扫描”菜单

6. 使用光标和 **ENTER** 选择一种**条件**：并确定选择。

对于外部触发 (190M-2-III)，请继续执行以下操作：

7. 使用光标和 **ENTER** 选择触发边沿（**边沿**）和电平（**电平**）。

8. 使用光标和 **ENTER** 选择 0.12V 或 1.2V 触发电平并确定所有记录器选项。


9. 向红色和黑色外部触发香蕉输入端口应用触发信号。

记录期间样本会继续保存在深层存储器。屏幕上显示最近记录的 12 个格。请参见图 19。使用**查看全部**来显示全部存储器内容。

注意

要了解有关单稳态触发功能的更多信息，请参阅[波形触发器](#)。

图 19. 已触发的单扫描记录

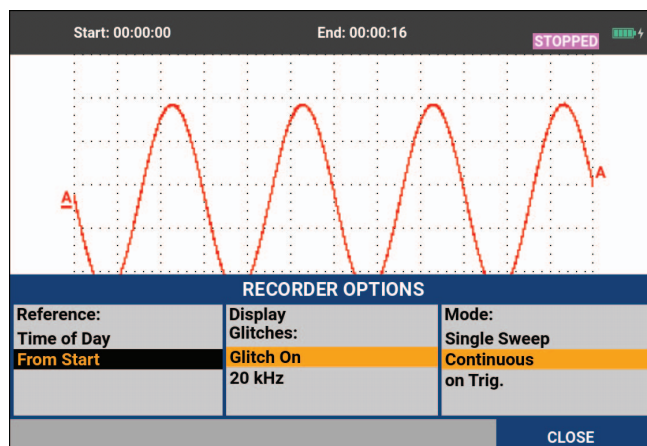

TrendPlot 或示波器记录分析

您可以借助“光标”和“缩放”分析功能利用 TrendPlot 或示波器记录进行详细的波形分析。请参见[重放、缩放及光标功能](#)。

重放、缩放及光标功能

本节介绍了分析功能：光标、缩放及重放。这些功能可以与一个或多个主要功能（如示波器、TrendPlot 或示波器记录）配合使用。不能组合使用两个或三个分析功能。

这些功能的一个典型应用如下所述：

- 重放最近存储的多个屏幕，以便找到所需的屏幕
- 放大信号事件
- 使用光标进行测量。

重放 100 个最近的示波器屏幕

处于示波器模式时，测试仪会自动存储 100 个最近的屏幕。按下“保持”键或“重放”键时，存储器内容将被冻结。可以使用“重放”菜单中的功能回溯，即通过逐一浏览所存储的屏幕来找到所需的屏幕。该功能让您可以在未按下“保持”键时捕获和查看信号。

重放详解

要浏览最近存储的多个示波器屏幕：


1. 在示波器模式下，按 **REPLAY** 打开“重放”菜单。

注意，波形会被冻结，而“重放”键会出现在屏幕顶部。请参见图 20。

2. 按 **F1** 浏览上一个屏幕。
3. 按 **F2** 浏览下一个屏幕。

注意，波形区域的底部显示重放栏，其中带有屏幕编号及相关时间戳。

图 20. 重放波形

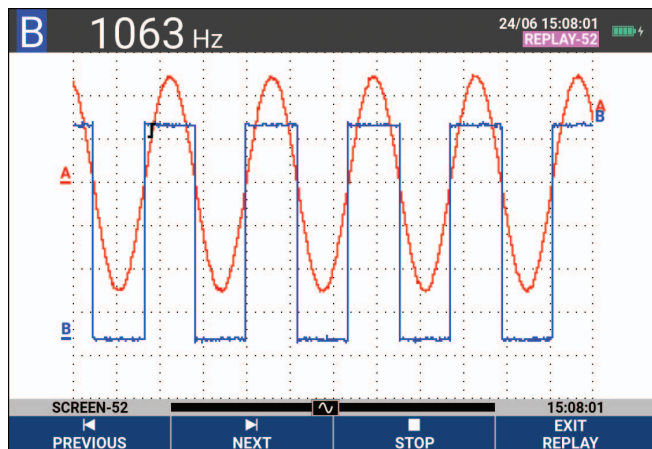

重放栏中有存储器内存储的全部 100 个屏幕。该图标代表屏幕上正在显示的画面（本例为：屏幕 -52）。如果重放栏部分为白色，说明存储器未完全存满 100 个屏幕。

此时您可以利用缩放和光标功能仔细研究信号。

连续重放

您还可以连续地重放所存储的屏幕，就像播放录像一样。

要连续重放：

1. 在示波器模式下，按  打开“重放”菜单。

注意，波形会被冻结，而“重放”键会出现在屏幕顶部。

2. 按  按照升序连续重放所存储的屏幕。

等待含有目标信号事件的屏幕出现。

3. 按  停止连续重放。

关闭重放功能

按  关闭重放。

自动捕获 100 个间歇性信号

在触发模式下使用测试仪时，将会捕获 100 个已触发屏幕。通过将触发可能性与捕获 100 个屏幕以供后续重放的能力相结合，可以使测试仪自动捕获间歇性异常信号。您可以利用这种方式对触发器使用“脉冲触发”，并能捕获 100 个间歇突波，或捕获 100 个 UPS 启动屏幕。

有关触发，请参见 [波形触发器](#)。

放大波形

为了获得一个更详细的波形视图，您可以利用“缩放”功能放大一个波形。

要放大波形：

1. 按  显示“缩放”键标签。

“缩放”键出现在屏幕顶部，波形被放大。

2. 使用   放大波形（减小“时间/格”）或缩小波形（增大“时间/格”）。


3. 使用   滚动。位置栏显示缩放部分相对于整个波形的的位置。

注意

即使键标签未显示在屏幕底部，也可以利用箭头键进行缩放。您还可以利用 **s TIME ns** 键来进行缩放。

注意，波形区域的底部显示缩放比例、位置栏及时间/格，请参见图 21。缩放范围取决于存储器中存储的数据样本量。

图 21. 放大波形

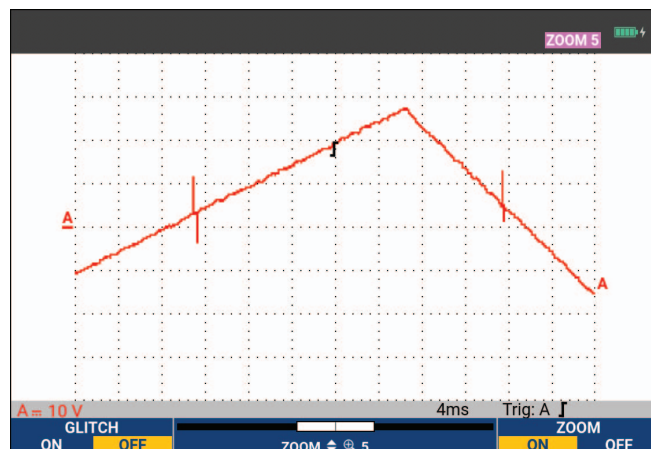

- 按 **F4** 关闭缩放功能。

光标测量

光标可用于对波形进行准确的数字式测量。可以在实时波形、所记录波形及所存储波形上进行测量。

波形上的水平光标

要使用光标测量电压：


- 在示波器模式下，按 **CURSOR** 显示光标键标签。
- 按 **F1** 突出显示水平光标图标。
- 按 **F2** 突出显示上部光标图标。
- 使用 **▲ ▼** 在屏幕上移动上部光标的位置。
- 按 **F2** 突出显示下部光标。
- 使用 **▲ ▼** 在屏幕上移动下部光标的位置。

注意

即使按键标签并未显示在屏幕底端，您仍可以使用光标。这使得可以在全屏视图中完全控制两个光标。

该屏幕显示了两个光标之间的电压差以及光标处的电压。请参见图 22。使用水平光标来测量振幅、高 / 低数值或波形过冲。

图 22. 利用光标进行电压测量

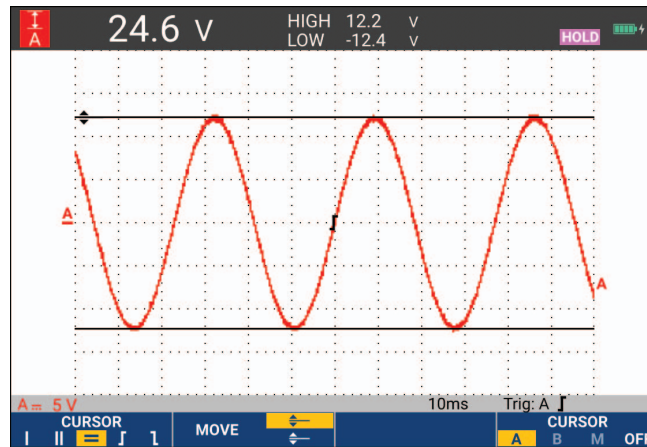


波形上的垂直光标

要使用光标测量时间(T, 1/T)、测量 mVs-mAs-mWs 或测量光标之间波形部分的 RMS:

1. 在示波器模式下，按 **CURSOR** 显示光标键标签。
2. 按 **F1** 突出显示垂直光标图标。
3. 按 **F3** 选择时间测量：T 等。
4. 按 **F4** 选择波形以放置标记：A、B、C、D 或 M（数学）。
5. 按 **F2** 突出显示左光标图标。
6. 使用 **◀ ▶** 在波形上移动左光标的位置。
7. 按 **F2** 突出显示右光标。
8. 使用 **◀ ▶** 在波形上移动右光标的位置。

该屏幕显示了两个光标之间的时间差以及两个标记之间的电压差。请参见图 23。

图 23. 利用光标进行时间测量

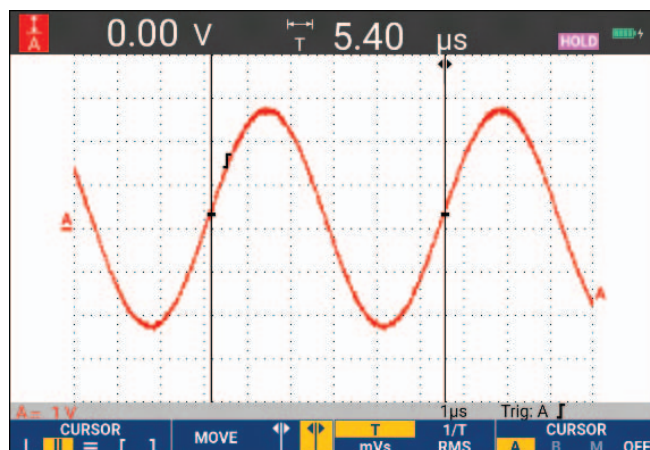

9. 按 **F4** 选择关闭，关闭光标。

注意

对于 *mVs-mAs-mWs* 测量：

- *mVs*：选择探针类型“电压”

- *mAs*：选择探针类型“电流”

- *mWs*：选择数学功能“x”，一个通道探针类型为“电压”，其他通道则为“电流”

在数学处理 (+ - x) 波形上使用光标

如果输入端口 A 的计量单位是（毫）伏，输入端口 B 的计量单位是（毫）安，则波形（比如 AxB 波形）的光标测量值的读数单位是瓦特。对于其他的波形，比如 A+B、A-B 或 AxB 波形，如果输入端口 A 和输入端口 B 的测量单位不同，则无法产生读数。

在频谱测量中使用光标

使用光标进行频谱测量：

1. 在频谱测量屏幕中，按 **CURSOR** 显示光标键标签。
2. 使用 **◀ ▶** 移动光标，并观察屏幕顶部的读数。

上升时间测量

对于上升时间测量：

1. 在示波器模式下，按 **CURSOR** 显示光标键标签。
2. 按 **F1** 突出显示上升时间图标。
3. 对于多个波形，按 **F4** 选择所需波形 A、B、C、D 或 M（如果启用了数学功能）。
4. 按 **F3** 选择“手动”或“自动”（自动执行第 5~7 步操作）。
5. 使用   移动上部光标至 100% 波形高度。


90 % 高度处会显示一个标记。

6. 按 **F2** 突出显示下降时间图标。
7. 使用   移动下部光标至 0% 波形高度。

10 % 高度处会显示一个标记。

读数显示波形振幅从 10 % 至 90 % 的上升时间。请参见图 24。

图 24. 上升时间测量

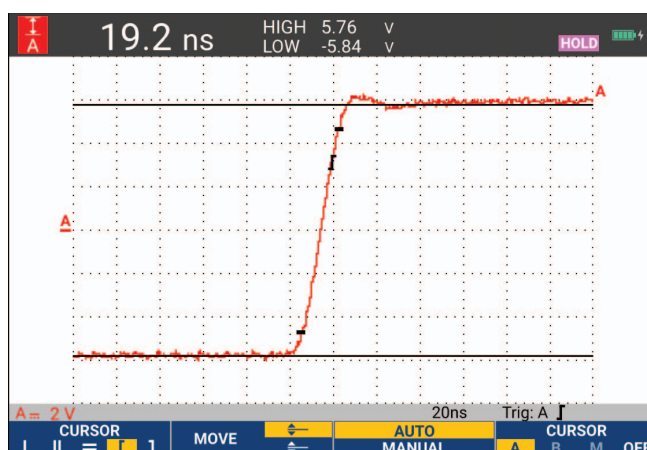

注意

使用键序列示波器 **F2**（读数），然后选择上升或下降时间，可以在光标打开的情况下直接访问上升时间或下降时间。

波形触发器

本节介绍了测试仪的触发功能。触发功能会告诉测试仪何时开始显示波形。您可以使用全自动触发，也可以控制一个或多个主触发功能（半自动触发），或者利用专门的触发功能来捕获特殊波形。

典型的触发应用：

- 利用 **Connect-and-View** 功能进行全自动触发，并且即时显示几乎任何波形。
- 如果信号不稳定，或者频率很低，您可以控制触发电平、触发边沿及触发延时，以便更好地查看信号。（见下一节。）

对于特定应用，可以使用以下其中一种手动触发功能：

- 边沿触发
- 脉宽触发
- 外部触发（仅适用于型号 190M-2-III）

触发电平和边沿

Connect-and-View™ 功能可以自动触发显示复杂的未知信号。

当测试仪在手动量程模式下时：

1. 按 **AUTO** 执行自动设置。

屏幕的右上方会出现“自动”。

自动触发功能可确保稳定地显示几乎任何信号。


此时您可以进行基本的触发控制，比如触发电平、触发边沿及触发延时。要手动优化触发电平和边沿：

2. 按 **TRIGGER** 显示“触发”键标签。
3. 按 **F2** 通过所选波形的上升沿或下降沿进行触发。
在双边沿触发（**X**）中，测试仪会由上升沿和下降沿触发。
4. 按 **F3** 启用光标以手动调整触发电平。
5. 使用   调整触发电平。

注意，触发器图标用于指示触发位置、触发电平及触发边沿。

屏幕底部显示触发参数。请参见图 25。比如，输入端口 A 以上升沿作为触发源。

图 25. 含有所有触发信息的屏幕

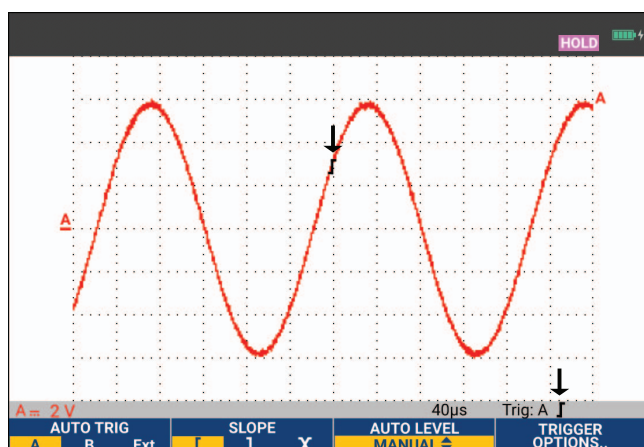

发现一个有效的触发信号时，触发器键将会亮起，并以黑色显示触发参数。未发现触发器时，触发参数显示为灰色，键灯将会熄灭。

触发延时或预触发

您可以在检测到触发点前后一段时间开始显示波形。最初会有半个屏幕（6 格）的预触发视图（下降延时）。

要设置触发延时：


1. 按住 **◀ MOVE ▶** 调整触发延时。

注意，屏幕上的触发图标移动，以显示新的触发位置。触发位置向左移动离开屏幕时，触发图标改变，表明您已经选择了一个触发延时。使触发图标移动到屏幕右侧时，可以显示预触发视图。这样可以查看触发事件之前的情况或触发原因。

对于触发延时，屏幕底部的状态会发生变化。请参见图 26。比如，输入端口 A 以上升沿作为触发源。500.0 ms 表示触发点与波形显示之间存在（正）延时。发现一个有效的触发信号时，触发器键将会亮起，并以黑色显示触发参数。未发现触发器时，触发参数显示为灰色，键灯将会熄灭。

图 26 显示了 500 ms 的触发延时示例（顶图）和 8 格预触发视图示例（底图）。

图 26. 触发延时或预触发视图

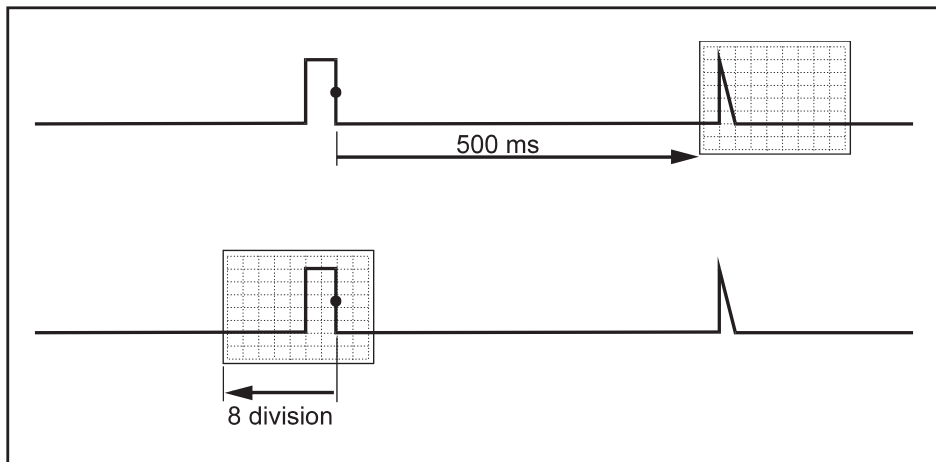

自动触发选项

触发菜单包含自动触发设置。

若要更改：

1. 按 **TRIGGER** 显示“触发”键标签。

注意

“触发”键标签会因最近所用的触发功能而不同。

2. 按 **F4** 打开“触发选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 打开“自动触发”菜单。

如果自动触发的频率范围设置为 >15 Hz，则 **Connect-and-View** 功能将会更快响应。因为不要求测试仪分析低频信号分量，所以响应更快。但是，如果测量频率低于 15 Hz，则必须要求测试仪分析低频信号分量，以便自动触发。4

4. 使用光标和 **ENTER** 选择 >1 Hz 并返回测量屏幕。

另请参见 [利用 **Connect-and-View**™ 功能查看未知信号](#)。

边沿触发

如果信号不稳定，或频率很低，可以使用边沿触发进行全手动触发控制。

要通过输入端口 A 的波形上升沿进行触发：

1. 按 **TRIGGER** 显示“触发”键标签。
2. 按 **F4** 打开“触发选项”菜单。
3. 使用光标的 **ENTER** 打开“边沿触发”菜单。

选择**自由运行**时，即使没有触发器，测试仪也会对屏幕进行刷新。屏幕上始终会显示一个波形。

选择**触发时**，测试仪需要一个触发器来显示波形。如果您想刷新屏幕，只能在出现有效的触发器时使用该模式。

选择**单稳态**时，测试仪等待触发器的出现。接收到一个触发器之后，会显示波形，并将仪器设置为“保持”。

在大多数情况下，请使用“自由运行”模式。

4. 使用光标的 **ENTER** 选择**自由运行**，跳至**触发器过滤器**。
5. 使用光标的 **ENTER** 将触发器过滤器设置为关闭。

注意，屏幕底部的键标签已相应地发生改变，以便于进一步选择特定的边沿触发设置。

噪声波形触发器

为了减少使用噪声波形触发时产生的屏幕抖动，您可以使用一个触发器滤波器。

从上一个例子的第 3 步开始继续操作：

1. 使用光标的 **ENTER** 选择**触发时**并跳至**触发器过滤器**。
2. 使用光标的 **ENTER** 将 **噪声抑制**或**高频抑制**设置为开。这由一个更高的触发图标进行指示。

启用**噪声抑制**时，会增大触发间隔。启用**高频抑制**时，（内部）触发信号中的高频噪声将被抑制。

单个事件采集

为了捕获单个事件，您可以执行单稳采集操作（单次屏幕刷新）。要设置测试仪，以便对输入端口 A 的波形进行单稳态捕获，请再次从第 3 步开始继续操作：

1. 使用光标和 **ENTER** 选择**单稳态**。


屏幕顶部显示“手动”字样，表示测试仪正在等待触发器。一旦测试仪接收到一个触发器，便会显示波形，并将仪器设置为“保持”。这由屏幕顶部的“保持”字样进行指示。请参见图 27。

2. 按 **HOLD RUN** 为测试仪提供一个新的单稳态。

注意

测试仪会将所有的单稳态存储在重放存储器中。使用“重放”功能可以查看所存储的全部单稳态。请参见[重放、缩放及光标功能](#)。

图 27. 进行单稳态测量

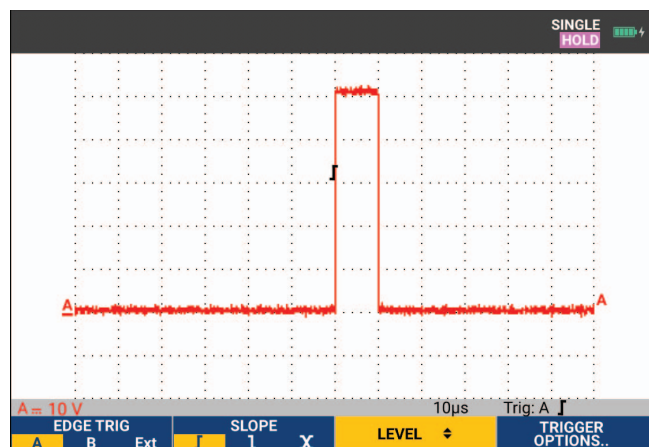

N 个周期触发器

N 个周期触发能让您创建一个稳定的 n 周期脉冲波形视图。在波形沿着与所选触发边沿相符的方向通过了 N 次触发电平之后，便会产生下一个触发器。


要选择 N 个周期触发，请再次从第 3 步开始继续操作：

1. 使用光标和 **ENTER** 选择**触发时**或**单稳态**，跳至**触发器过滤器**。
2. 使用光标和 **ENTER** 选择**触发器过滤器**或将其设置为关闭。

3. 使用光标的 **ENTER** 将 **N** 个周期设置为开。
注意，屏幕底部的键标签已经发生改变，以便于进一步选择特定的 **N** 个周期触发设置。
4. 使用 **◀ ▶** 设置 **N** 个周期数。
5. 使用 **▲ ▼** 调整触发电平。

带有 **N** 个周期触发器 (**N=7**) 的波形显示在显示屏上。请参见图 28。

图 28. 带有 **N** 个周期触发器的波形

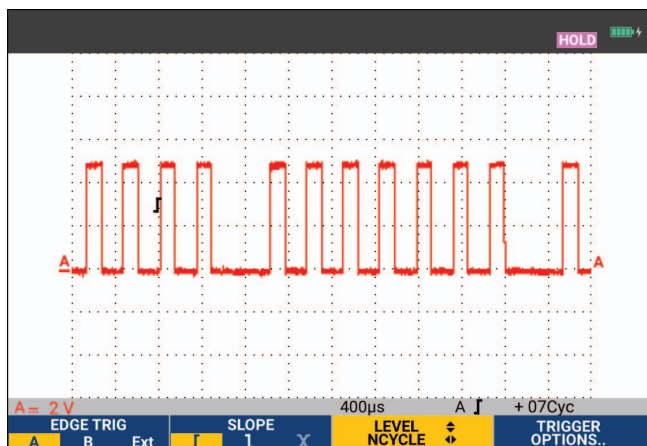

外部波形触发 (190M-2-III)

当使用第三方信号进行触发时，如果想要显示输入端口 **A** 和 **B** 的波形，请使用外部触发。

您可以选择带自动触发或边缘触发的外部触发：

1. 向红色和黑色 4-mm 香蕉插口输入端口提供一个信号。

在本例中，将继续以边沿触发为例。

要选择外部信号作为触发源：

2. 按 **TRIGGER** 显示触发器（边沿）键标签。
3. 按 **F1** 选择 **Ext**（外部）边沿触发器。

注意，屏幕底部的键标签已经发生改变，以便于从两个不同的外部触发电平中进行选择：0.12 V 和 1.2 V。

4. 按 **F3** 选择外部电平标签下的 **1.2V**。

从此刻起，触发电平就固定不变，并与逻辑信号匹配。

脉冲触发器

利用脉宽触发可以隔离和显示按时间限定的特定脉冲，比如突波、丢失脉冲、突发脉冲或信号衰落等。

窄脉冲

要将测试仪设置为少于 5 ms 的窄正脉冲触发：

1. 为红色输入端口 A 施加一个视频信号。
2. 按 **TRIGGER** 显示“触发”键标签。
3. 按 **F4** 打开“触发选项”菜单。
4. 使用光标的 **ENTER** 选择脉冲宽度菜单上的 **A** 上的脉冲宽度以打开触发器。
5. 使用光标的 **ENTER** 选择负脉冲图标并跳至条件。
6. 使用光标的 **ENTER** 选择 **<t** 并跳至刷新。
7. 使用光标的 **ENTER** 选择触发时。

测试仪此时只能通过窄脉冲进行触发。注意，屏幕底部的触发键标签已经发生改变，以便于设置脉冲条件。

要将脉宽设置为 100 μ s：


8. 按 **F1** 启用光标以调整脉冲宽度。
9. 使用 **▲** **▼** 选择 100 μ s。

所有少于 100 μ s 的较窄正脉冲均显示在屏幕上。请参见图 29。

注意

测试仪会将所有触发的屏幕存储在重放存储器中。比如，如果您为突波设置了触发器，就可以捕获 100 个带有时间戳的突波。使用“重放”键可以查看所有存储的突波。

图 29. 通过窄突波进行触发

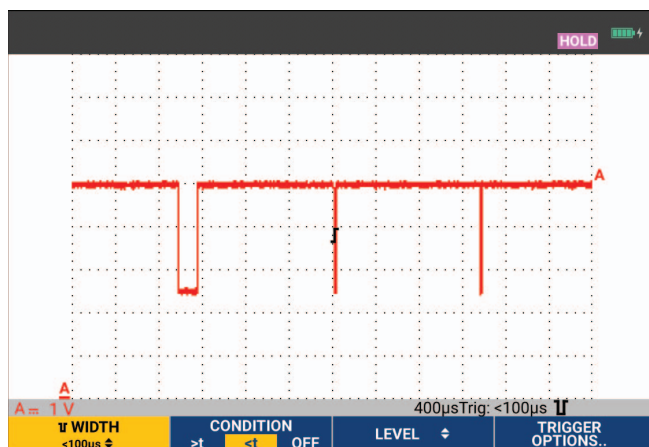

脉冲缺失

下一个示例介绍了如何查找正脉冲序列中缺失的脉冲。本例假设脉冲的两个上升沿的间距为 100 ms。如果时间意外增加到 200 ms，将会丢失脉冲。

为了将测试仪设置为通过这种丢失脉冲进行触发，需要使其触发间隔大于 110 ms：


1. 按 **TRIGGER** 显示“触发”键标签。
2. 按 **F4** 打开“触发选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 选择 **A** 上的脉冲宽度，然后打开“通过脉冲宽度触发”菜单。
4. 使用光标和 **ENTER** 选择正脉冲图标以触发正脉冲，然后跳至条件。
5. 使用光标和 **ENTER** 选择 **>t** 并跳至刷新。
6. 使用光标和 **ENTER** 选择“触发时”并退出菜单。

该测试仪此时能够通过大于可选持续时间的脉冲进行触发。注意，屏幕底部的触发菜单已经发生改变，以便于设置脉冲条件。请参见图 30。

要将脉宽设置为 400 μ s：

7. 按 **F1** 启用光标并调整脉冲宽度。
8. 使用 **▲ ▼** 选择 400 μ s。

图 30. 通过丢失脉冲进行触发

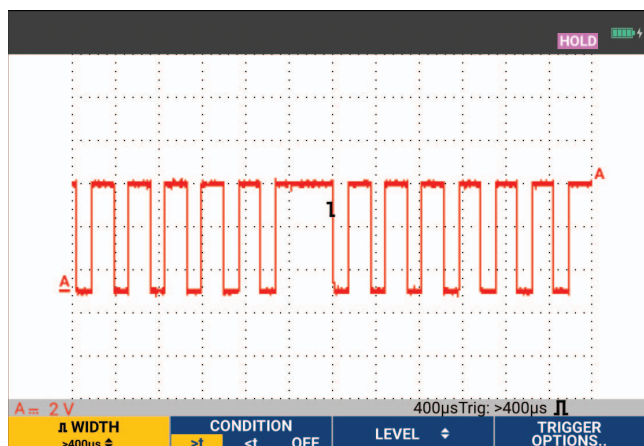

存储器和 PC

本节按操作步骤介绍了测试仪在示波器、万用表或记录器三种主要模式下使用时的常规功能。本节末尾将会介绍计算机通信的内容。

USB 端口


测试仪配有两个 USB 端口：

- 一个USB-主机端口，用于连接外部闪存驱动器（USB存储盘），以便存储数据。最大内存大小为 32 GB。
- 一个Mini-USB-B端口，用于将测试仪连接到PC，以便在PC控制下进行远程控制和数据传输，请参阅[FlukeView™ 2 软件](#)。

USB 主机端口还可与选装的 WiFi-USB 适配器配合使用，以便无线连接至安装了 FlukeView 2 软件的 PC。请参见[WiFi 连接](#)。

该端口与输入通道完全隔离，且在不使用时有防尘盖遮挡。请参见[图 31](#)。

图 31. 测试仪 USB 连接

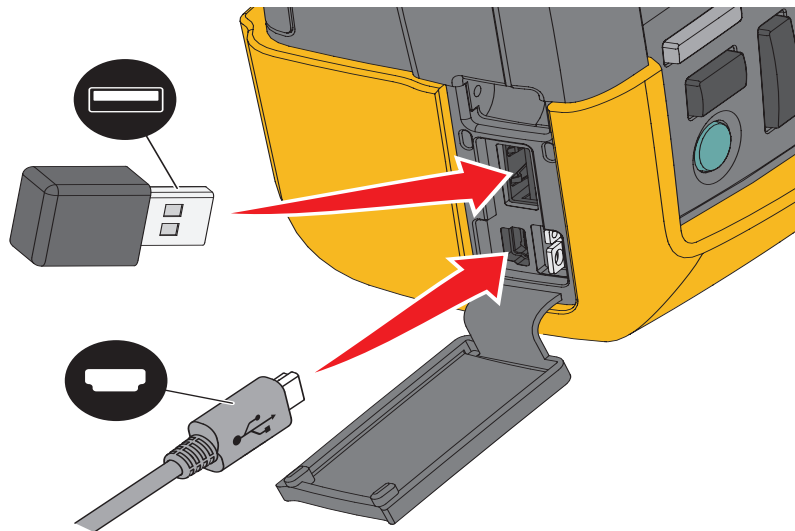

USB 驱动程序

要进行通信，测试仪需要在您的计算机上安装 USB 驱动程序。Windows 10 和更高版本会自动识别测试仪并使用 Windows 提供的驱动程序。不需要特殊驱动程序。第一次连接测试仪时，Windows 会激活这些驱动程序。可能需要管理员帐户和有效的 Internet 连接，Windows 才能加载最新的驱动程序。

安装驱动程序后，Windows 设备管理器的通用串行总线控制器部分中会显示一个附加的 USB 复合设备。此时，您可以通过 USB 连接使用 FlukeView 2 软件。

USB 设备旁边还有一个 USB 串行设备 (COM 3)，显示在 Windows 设备管理器端口部分。此 COM 端口用于校准。

注意

COM 端口号可能不同，由 Windows 自动分配。

保存和调用

测试仪可以：

- 将屏幕和设置保存在内存中，然后可以从中再次调用。测试仪拥有 30 个屏幕和设置存储器、10 个记录和设置存储器以及 9 个屏幕图像存储器。请参见表 3。
- 可以将多达 256 个屏幕和设置保存在 USB 存储设备中，然后可以再次从中调用。
- 根据自己的偏好命名已保存的屏幕及相关设置。
- 可在后期调用屏幕和记录来分析屏幕图像。
- 调用一个设置，以便通过所调用的操作配置继续进行测量。

所保存的数据存储在非易失性闪存中。未保存的仪器数据存储在 RAM 存储器中，如果在未通过 BC190 电源适配器供电的条件下取下电池，这些数据最少能保存 30 秒钟。

表 3. 测试仪内存

模式	存储位置		
	30x	10x	9x
仪表	设置 + 1 个屏幕	---	屏幕图像
示波器	设置 + 1 个屏幕	设置 + 100 个重放屏幕	屏幕图像
示波器记录器	---	设置 + 记录数据	屏幕图像
TrendPlot	---	设置 + TrendPlot 数据	屏幕图像

在余辉模式下，将保存最近的波形，而不是生成余辉显示的所有波形。

存储数据的文件列表使用以下图标：

-  设置 + 1 个屏幕
-  设置 + 重放屏幕/记录数据
-  设置 + TrendPlot 数据
-  屏幕图像 (imagexxx.bmp)

您可以将屏幕图像复制到测试仪连接的 USB 存储盘中。将 USB 存储盘连接到 PC，您便可以将图像插入到文本文档中。复制功能在“保存”和“文件选项”下可用。屏幕图像无法调用到屏幕上。

保存包含关联设置的屏幕

要在示波器模式下保存，例如屏幕 + 设置：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。

从此时起屏幕将会冻结。

2. 按 **F1** 打开“保存”菜单。

观察可用和已用存储位置的数量。

在万用表模式中，此时将显示“另存为”菜单，因为只能保存设置+屏幕，见第 4 步。

3. 按 **F1** 选择目标存储器 INT（内存）或 USB（USB 设备）。

注意，如果您选择 USB，则使用新的“保存”菜单。

您可将数据以 .csv 格式保存到 USB 存储盘。保存的 .csv 文件可用于在 FlukeView ScopeMeter 或 Excel 中分析数据。

4. 使用光标的 **ENTER** 选择屏幕+设置并打开“另存为”菜单。

在“另存为”的下方，默认名称 + 序列号以及“确认并保存”已被选定。如要更改此特定的“屏幕+设置”的名称，或者更改默认名称，请参见[编辑名称](#)。

5. 按 **ENTER** 保存屏幕+设置。

6. 要继续测量，请按 **HOLD RUN**。

所有存储器都在使用中

如果没有空闲存储位置可用，将会弹出一条消息，建议您覆盖最早的数据集：

- 如果您不想覆盖最早的数据集，请按 **F3**。删除一个或多个存储位置，再进行保存。
- 如果您想覆盖最早的数据集，请按 **F4**。

编辑名称

要按照您的个人喜好命名“屏幕 + 设置”，请从[保存包含关联设置的屏幕](#)中描述的第 4 步开始继续操作：

5. 按 **F1** 打开“编辑名称”菜单。
6. 按 **F2** 跳至一个新的字符位置。
7. 使用光标和 **ENTER** 选择另一个字符，然后按 **ENTER** 键确定您的选择。继续编辑字符，直到完成。
8. 按 **F1** 确定名称，返回“另存为”菜单。
9. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**确认并保存**，从而使用编辑后的名称保存实际屏幕。

要修改测试仪生成的默认名称，请从第 8 步中提到的“另存为”菜单继续操作：

9. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**设置默认值**并保存新的默认名称。
10. 使用光标和 **ENTER** 突出显示**确认并保存**，并使用新的默认名称保存实际屏幕。

“记录 + 设置”存储位置不仅仅存储屏幕上的可视内容。在 TrendPlot 或示波器记录模式中，保存的是完整的记录。在示波器模式中，您可以将全部 100 个重放屏幕保存在一个“记录 + 设置”存储位置。

要保存 TrendPlot，首先选择“停止”。

以 .bmp 格式保存屏幕（打印屏幕）

要以位图 (.bmp) 格式保存屏幕：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F3** 将屏幕保存到：
 - 内存 (INT)（如果未连接 USB 设备）。
 - USB 设备（如已连接）。

该文件使用一个固定的名称 (IMAGE) 及一个序列号进行保存，比如保存为 IMAGE004.bmp。如果没有空闲存储位置可用，将会弹出一条消息，建议您覆盖最早的数据集：

- 如果您不想覆盖最早的数据集，请按 **F3**，然后删除一个或多个存储位置，再重新保存。
- 如果您想覆盖最早的数据集，请按 **F4**。

删除包含关联设置的屏幕

要删除屏幕和关联设置：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F4** 打开“文件选项”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 或 USB 设备作为源设备。
4. 使用   突出显示**删除**。
5. 按 **ENTER** 确定选择，然后跳至文件名字段。
6. 使用   选择要删除的文件，或按 **F2** 选择所有文件以删除。
7. 按 **ENTER** 删除选定的文件。

调用包含关联设置的屏幕

要调用屏幕+设置：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F2** 打开“调用”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 或 USB 设备作为源设备。
4. 使用   突出显示**数据**。
5. 按 **ENTER** 确定您的选择，然后跳至文件名字段。
6. 使用   选择要调用的文件。
7. 按 **ENTER** 可调用选定的屏幕+设置。

注意，屏幕上显示被调用的波形，且出现“保持”。此时您便可以利用光标和缩放功能分析波形，或者打印所调用的屏幕。

要调用一个屏幕作为基准波形与一个实际测量的波形进行比较，请参见[波形比较](#)。

调用设置配置

要调用设置配置：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F2** 打开“调用”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 或 USB 设备作为源设备。
4. 使用   突出显示 **设置**。
5. 按 **ENTER** 确定您的选择，然后跳至文件名字段。
6. 使用   选择要调用的文件。
7. 按 **ENTER** 可调用选定的设置。

此时您可以在新的操作配置中继续工作。

查看存储的屏幕

若要在滚动显示存储器的同时查看所存储的屏幕：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F2** 打开“调用”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 或 USB 设备作为源设备。
4. 按 **ENTER** 跳至文件名字段。
5. 使用   突出显示文件。
6. 按 **F2** 查看屏幕并打开查看器。
7. 使用   滚动浏览所有存储的屏幕。
8. 按 **F3** 将屏幕保存到所连接的 USB 存储设备或内存。
9. 按 **F4** 退出查看模式。

注意

您无法在“查看”模式下查看已保存的“记录+设置”的重放屏幕。使用该方式只能查看即时存储的屏幕。若要查看所有的重放屏幕，需要利用“调用”选项从存储器中调出。

重命名存储的屏幕和设置文件

要修改存储文件的名称：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F4** 打开“文件选项”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 作为源设备。
4. 使用 **▲ ▼** 突出显示**重命名**。
5. 按 **ENTER** 确定您的选择，然后跳至文件名字段。
6. 使用 **▲ ▼** 突出显示要重命名的文件。
7. 按 **ENTER** 打开“重命名”菜单。
8. 按 **F2** 跳至一个新的字符位置。
9. 使用光标和 **ENTER** 选择另一个字符。重复第 8 和第 9 步操作，直到完成重命名。
10. 按 **F1** 确定名称并返回“重命名”菜单。

复制/移动存储的屏幕和设置文件

您可以将内存中的一个文件复制或移动到 USB 设备中，或者从 USB 设备复制 / 移动到内存中。

要复制或移动文件：

1. 按 **SAVE** 显示“保存”键标签。
2. 按 **F4** 打开“文件选项”菜单。
3. 按 **F1** 选择内存 (INT) 或 USB 设备作为源设备。另一个存储器是目标位置。
4. 使用 **▲ ▼** 突出显示**复制或移动**（复制和删除源）文件。
5. 按 **ENTER** 确定您的选择，然后跳至文件名字段。
6. 使用 **▲ ▼** 选择要复制或移动的文件，或按 **F2** 选择所有文件。
7. 使用 **▲ ▼** 复制或删除选定的文件。

FlukeView™ 2 软件

利用 FlukeView 2 软件，您可以将波形数据及屏幕位图上传到您的个人计算机或笔记本电脑，以便于进一步处理。

FlukeView 2 for ScopeMeter 测试仪演示可从 www.fluke.com 下载。

安装后：

1. 启动 FlukeView 2 软件。
2. 按**帮助**可访问该程序的文档。

计算机连接

要将测试仪连接到一台 PC 或笔记本电脑，以便使用 FlukeView 2 软件（操作环境 Windows®）：

1. 利用一根 USB-A 转 mini-USB-B 接口连接线将一台计算机连接到测试仪的微型 USB 端口。请参见图 32。

USB 驱动程序将自动安装。请参见[USB 驱动程序](#)。

2. 安装 FlukeView 2 演示版。有关如何安装和使用软件的信息，请参阅《*FlukeView 2 用户手册*》。

该套件包含一个激活代码，可将 FlukeView 2 演示版转换为完整版。

测试仪输入通道与 USB 端口实现了电气隔离。在向 USB 存储盘保存数据或从中调用数据时，不能通过 mini-USB 端口进行远程控制和数据传输。

WiFi 连接

测试仪可以通过 WiFi USB 适合器连接到具有无线 LAN 接口的计算机、平板电脑或智能手机。要支持无线通信，请使用 USB 端口插入受支持的 WiFi-USB 适配器。请参见图 32。

要设置测试仪的无线连接：

1. 按 **WiFi** + **F1** 打开 WiFi。

“信息”部分将显示 **WiFi**。

当计算机网络设置或 Fluke Connect™ 应用程序提示输入 WiFi 名称 (SSID) 以检测测试仪时，请选择型号和序列号。

出现提示时，请使用密钥标签栏中显示的密码。

2. 使用 **F2** 将屏幕截图发送至 Fluke Connect™ 应用程序。
3. 按 **WiFi** + **F1** 关闭 WiFi。**WiFi** 不再显示在屏幕顶部的“信息”区域中。

图 32. 计算机连接




提示

本节就如何有效地使用测试仪介绍了一些相关信息及提示。

标准配件

下列图示介绍了电压探针、测试引线及各种夹头等标准配件的使用。


图 33. 使用接地簧片连接高频电压探针

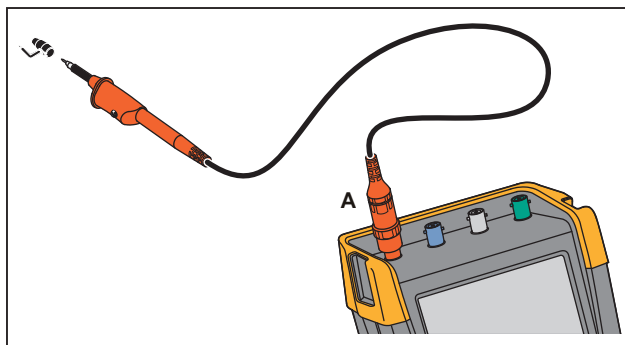

⚠️⚠️ 警告

为避免发生电击或火灾，请不要将接地簧片连接到对地电压 $>30\text{ Vrms}$ 的电压。

图 34. 为测量任务使用钩式夹/鳄鱼夹接地进行电气连接

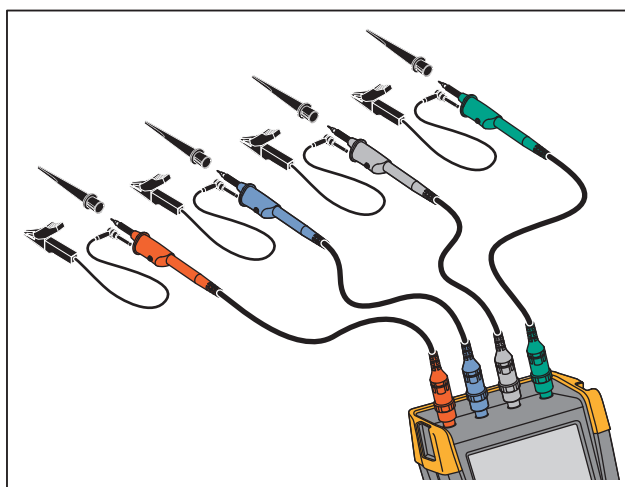

⚠️⚠️ 警告

为防止电击，请在不使用钩式夹时将绝缘套管重新套到探针尖端上。这还可避免在连接接地引线时意外互连多个探针的基准触点，或避免通过探针裸露的接地环对任何电路短路的风险。

独立浮动隔离输入

测试仪具有独立浮动的隔离输入端口。您可以利用独立浮动隔离输入端口来测量相互独立浮动的信号。与带有普通基准端口或接地端口的输入端口相比，独立浮动隔离输入端口具有更强的安全性和测量能力。

每个输入端口部分（A、B、C、D、METER INPUT）均有其自己的信号输入端口和基准输入端口。每个输入端口部分的基准输入端口都与其他输入端口部分的基准输入端口实现电气隔离。隔离输入端口的结构让测试仪几乎相当于四个独立的仪器。独立浮动隔离输入端口的优势体现在：


- 能够同时测量独立浮动信号。
- 具有更高的安全性：
 - 由于不是直接与公共端子相连，测量多个信号时发生短路的可能性大大降低。
 - 测量多接地系统时，所产生的接地电流降至最低程度。

由于基准端不是共同连接在测试仪内部，因此所用输入端口的每个基准端必须连接至一个基准电压。独立浮动隔离输入端口仍然会通过寄生电容进行耦合。输入端口的基准端与环境之间以及输入端口的基准端相互之间都有可能出现上述情况。请参见图 35。因此，您应该将基准端连接至系统的接地端或另一个稳定的电压上。如果输入端口的基准端被连接到一个高速信号和 / 或高压信号，您应该想到可能存在寄生电容。参见图 35、图 37、图 38 和图 39。

注意

输入通道与 USB 端口及电源适配器输入端口之间实现电气隔离。

图 35. 探针、仪器与环境之间的寄生电容

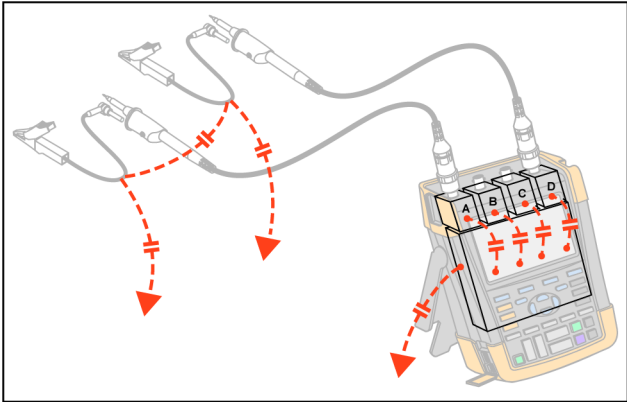

注意

寄生电容可能导致信号振铃。在探针电缆周围添加铁氧体磁珠可限制振铃。

⚠ 警告

为防止发生电击，使用探针基准（接地）引线时，请务必使用绝缘套管或钩式夹。施加到基准引线的电压也会出现在探针尖端附近的接地环上，请参见图 36。隔离套管可避免在连接接地引线时意外互连多个探针的基准触点，或避免通过裸露的接地环对任何电路短路的风险。

图 36. 探针尖端

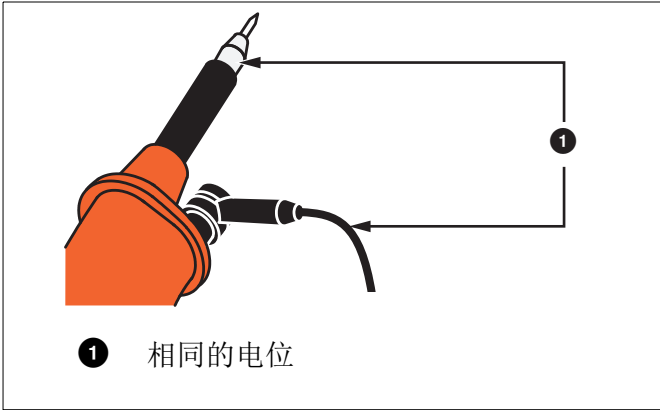


图 37. 模拟基准端与数字基准端之间的寄生电容

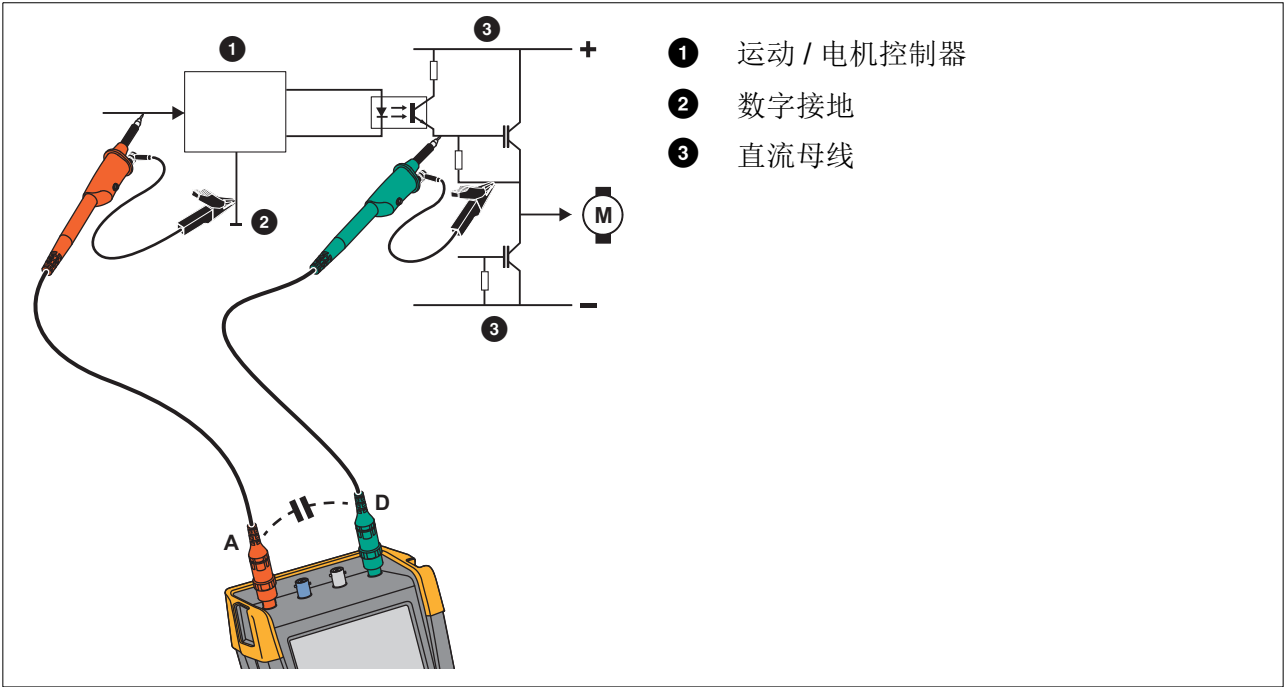


图 38. 基准引线连接正确


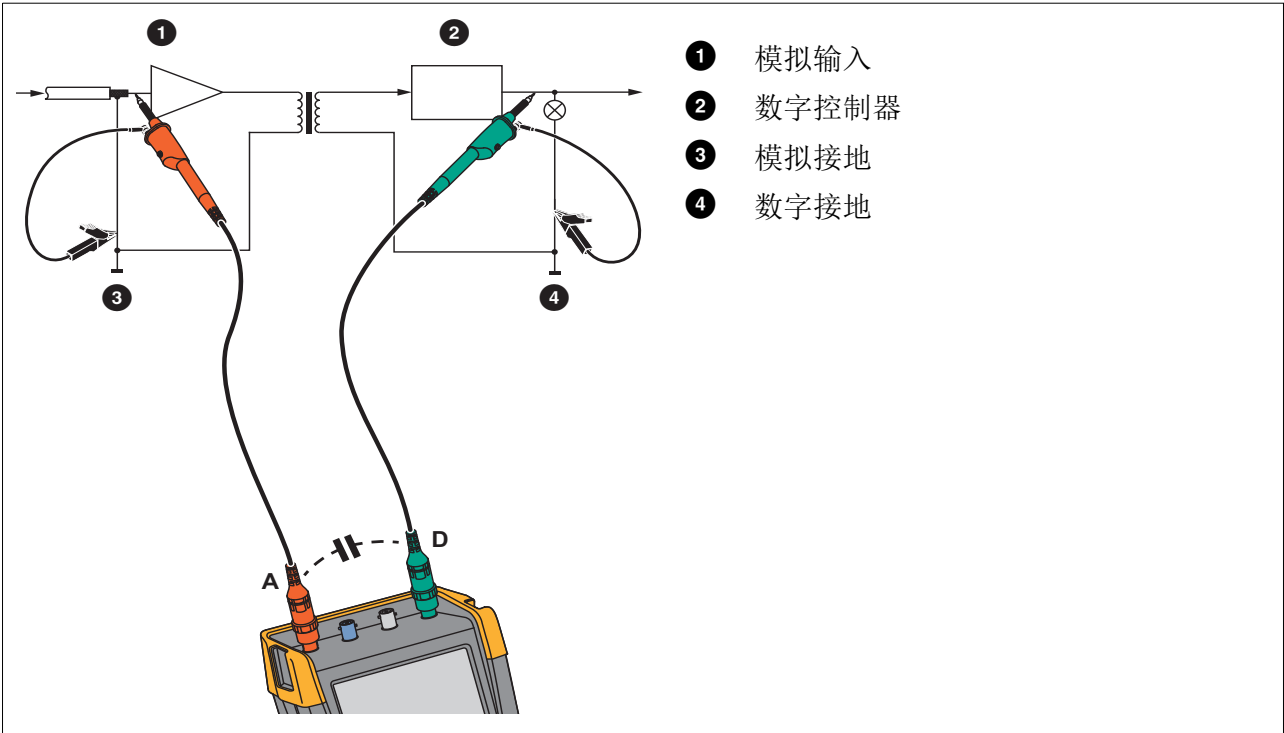


图 39. 基准引线连接错误

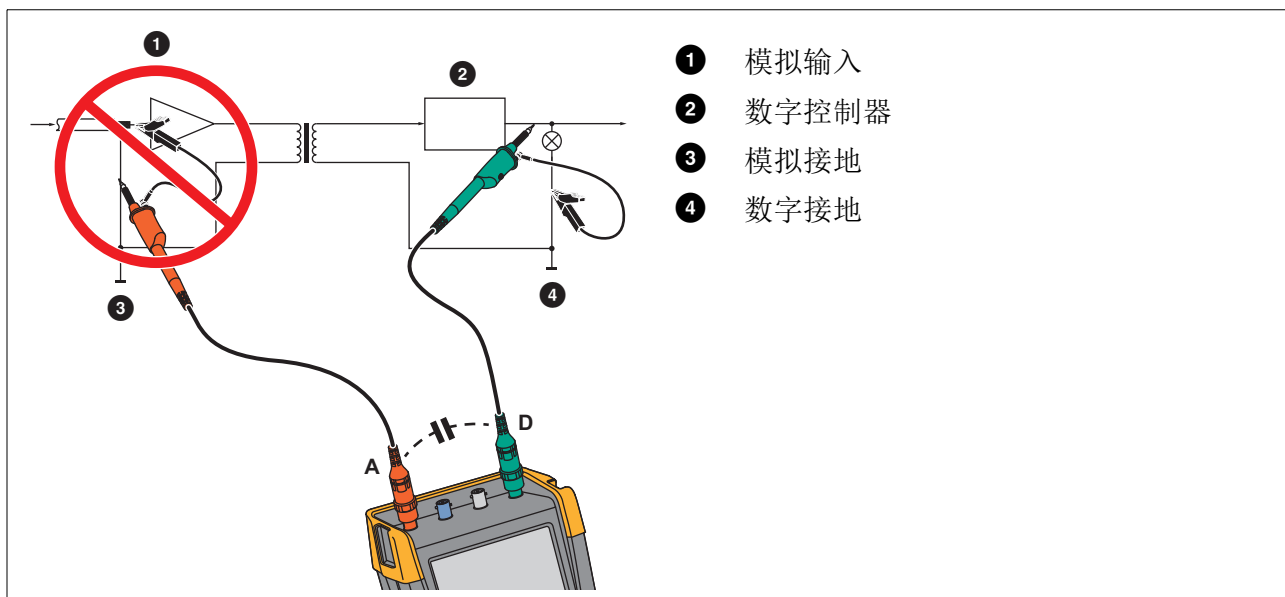


基准引线 D 获取的噪声会通过寄生电容传送至模拟输入放大器。

倾斜支架

测试仪配有一个斜立支架，这使得可以将它以一定的倾角放在台面上以方便查看。请参见图 40。


图 40. 倾斜支架

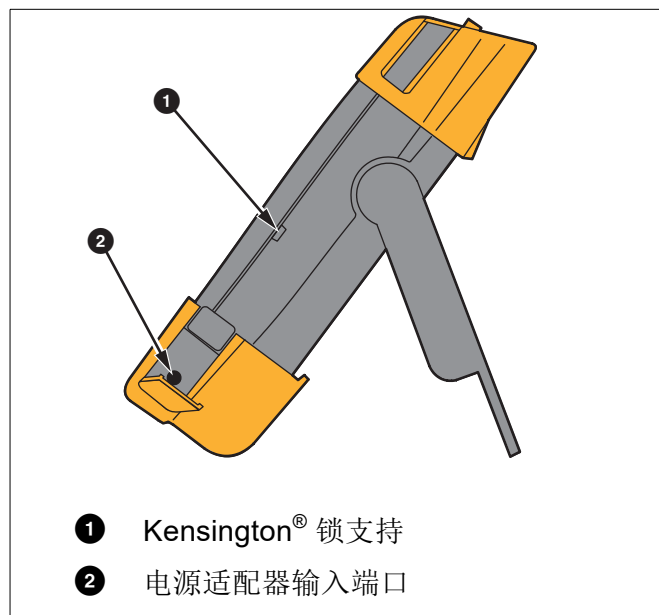

注意

可选挂钩（零件号 HH290）连接到测试仪的后部。利用挂钩可以将测试仪悬挂在一个方便查看的位置，比如柜门或隔墙上。请参见图 41。

图 41. 挂钩

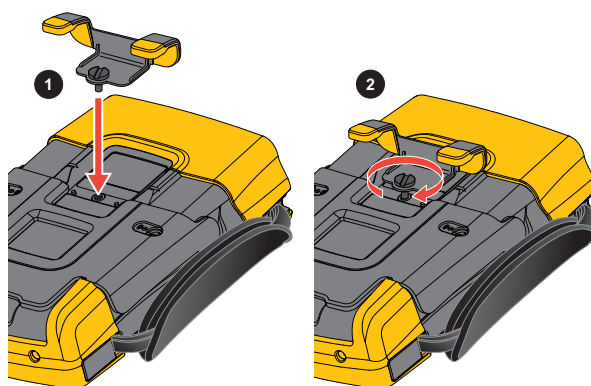


Kensington® 锁

测试仪配有一个与 Kensington® 锁相兼容的安全插槽。请参见图 40。Kensington 安全插槽以及锁缆通过物理方式防止仪器被偷窃。锁缆可以从笔记本电脑零配件代理商等商家处购买。

挂带

挂带随测试仪一并提供。请参见图 42。

图 42. 挂带

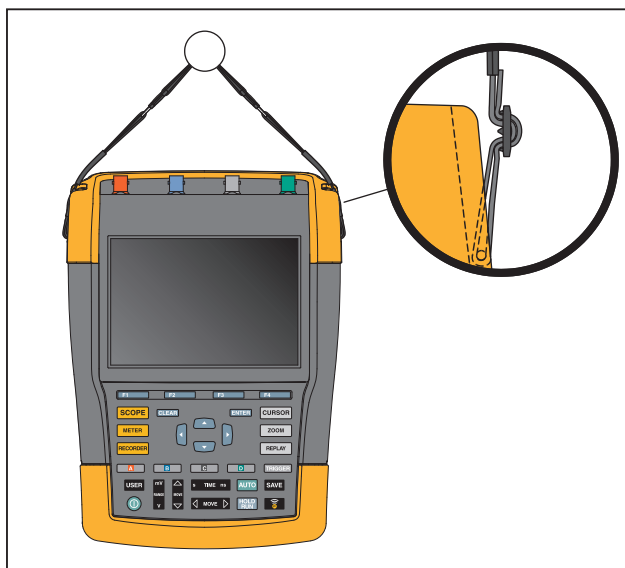

重置测试工具

如果您想将测试仪恢复为出厂设置而不清除存储内容：

1. 按 ① 关闭测试仪。
2. 按住 **USER**。
3. 按下并释放 ①。

测试仪打开并发出两声嘟嘟声，这表示重置成功。

4. 释放 **USER**。

要将测试仪恢复为出厂设置并清除所有存储内容：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F1** 打开“选项”菜单。
3. 向下移动光标并高亮显示出厂默认设置。
4. 按 **ENTER**。

语言设置

在测试仪运行期间，屏幕底部可能显示相关消息。您可以选择这些消息的显示语言。本例中您可以选择英语或法语。

要将语言从英语更改为法语：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F2** 打开“语言选择”菜单。
3. 使用光标突出显示**法语**。
4. 按 **ENTER** 确定法语作为显示语言。

注意

测试仪中可用的语言可能与本示例中的不同。

亮度

要调整背光亮度：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F4** 选择手动背光调整。
3. 使用 **◀ ▶** 调整背光。

注意

新的亮度值将会一直保存，直到再次做出更改。

为了节省电池电量，测试仪在使用电池工作时会采用省电亮度模式。连接电源适配器时，测试仪的高亮强度会增加。

注意

使用暗光可延长电池的工作时间。

日期和时间

测试仪含有能够显示日期和时间的时钟。

要更改日期：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F1** 打开“用户选项”菜单。
3. 使用光标和 **ENTER** 选择“日期调整”菜单。

4. 使用光标的 **ENTER** 选择年份，然后跳转到月份。
5. 使用光标的 **ENTER** 选择月份，然后跳转到日期。
6. 使用光标的 **ENTER** 选择日期，然后跳转到格式：
7. 使用光标的 **ENTER** 选择 DD/MM/YY 并确定新日期。

按照相同的流程打开“时间调整”菜单并更改设置。

电池电量

使用电池工作时，测试仪会通过关机来节省电量。如果在 30 分钟内未按下任何键，测试仪会自动关闭。

如果启用了 TrendPlot 或示波器记录功能，则不会自动断电，但会调暗背光。即时电量较低，也会继续记录数据，而且不会损坏存储器的保存功能。

要在不自动关机的情况下节省电池电量，可以使用显示屏自动关闭选项。显示屏将在选定时间（30 秒或 5 分钟）过后关闭。

注意

如果连接了电源适配器，自动关机和显示屏自动关闭功能将被禁用。

关机定时器

默认关机时间为 30 分钟。

您可以将关机时间设置为 5 分钟：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F1** 打开“用户选项”菜单。
3. 使用光标的 **ENTER** 打开“电池省电选项”菜单。
4. 使用光标的 **ENTER** 选择“仪器自动关闭”和 5 分钟。

显示屏自动关闭定时器

显示屏自动关闭定时器默认设为禁用（不自动关闭显示屏）。

要将显示屏自动关闭定时器设为 30 秒钟或 5 分钟：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F1** 打开“用户选项”菜单。
3. 使用光标的 **ENTER** 打开“电池省电选项”菜单。

4. 使用光标的 **ENTER** 选择显示屏自动关闭 30 秒或 5 分钟。

超过指定时间之后，显示屏将会关闭。

要再次打开显示屏：

- 按下任意键。显示屏将再次打开，显示屏自动关闭定时器将再次启动。超过指定时间之后，显示屏将会再次关闭。
- 连接电源适配器时将会禁用自动关闭定时器。

自动设置选项

您可以按照下面介绍的流程选择在“自动-手动”（自动设置）键被按下时自动设置的响应方式。

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F1** 打开“用户选项”菜单。
3. 使用光标的 **ENTER** 打开“自动设置调节”菜单。

如果频率范围设置为 >15 Hz，则 **Connect-and-View** 功能将会更快响应。因为不要求测试仪分析低频信号分量，所以响应更快。但是，如果测量频率低于 15 Hz，则必须要求测试仪分析低频信号分量，以便自动触发。

4. 使用光标的 **ENTER** 选择 1 Hz 及以上，然后跳至**输入耦合**。

在您按下“自动-手动”（自动设置）键时，输入耦合可被设置为直流或保持不变。

5. 使用光标的 **ENTER** 选择**保持不变**。

在您按下“自动-手动”（自动设置）键时，突波捕获可被设置为“开启”或保持不变。

6. 使用光标的 **ENTER** 选择**保持不变**。

注意

信号频率自动设置选项类似于信号频率的自动触发选项。请参见[自动触发选项](#)。但是，自动设置选项用于设定自动设置功能的响应方式，只有在您按下自动设置键时才会显示其影响。

维护

本节介绍用户可以执行的基本维护程序。对于完整的服务、拆解、维修和校准信息，请访问 www.fluke.com 查阅 《190 III 校准手册》。

警告

为了防止可能发生触电、火灾或人身伤害：

- 请经过认可的技术人员修复产品。
- 仅使用指定的备件。
- 进行任何维护之前，请仔细阅读本手册开头的安全信息。
- 清洁测试仪之前先断开输入信号。

请用一块湿布蘸上温和的肥皂水进行清洁。切勿使用研磨剂、溶剂或酒精。这些物质可能损毁测试仪上的文本内容。

存储

如要长期存放测试仪，请在存放之前为锂电池充足电。

锂电池组

电池组安全存放建议：

- 在使用之前，不要将电池组从其原始包装中取出。
- 设备不用时，尽可能拆下电池组。
- 长期存放前，为电池组充满电，以防出现损坏。
- 长时间存放后，可能有必要多次充放电，以获得最佳性能。
- 将电池组放在儿童和动物接触不到的地方。

电池组安全使用建议：

- 使用前必须将电池组充电。只能使用经 **Fluke** 批准的电源适配器给电池组充电。请参阅用户手册了解正确的充电方法。

- 不使用时，不要长时间给电池充电。
- 切勿使电池组受到严重的撞击，比如机械冲击。
- 保持电池组清洁和干燥。用干燥、清洁的布清理接头。
- 将电池放入产品或外置式电池充电器时，应当注意电池的正确放置。
- 禁止使用明显损坏的电池组或充电器。
- 改动电池组：如果电池组似乎不能正常工作，或者已经发生物理损坏，请不要试图拆开、改动、改造或维修电池组。
- 妥善保管原始产品资料，以便日后查阅。

电池组安全运输建议：

- 电池组必须受到充分保护，防止在运输期间短路或损坏。
- 参考国际航空运输协议 (IATA) 中有关安全运输锂离子电池的规定。

要有效地维护电池：

- 中度使用 5 年或重度使用 2 年后，请更换充电电池。
- 中度使用被定义为每周充电两次。
- 重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。

给电池充电

在交付仪器时，锂电池可能已没电，必须充电至少 5 个小时（关闭测试仪的情况下）以达到满电量。由电池供电时，屏幕顶部的电池指示符会告知电池的状况。

电池符号为：。

 表示只能再使用五分钟时间。

要为电池充电并为仪器供电，请连接电源适配器。请参见图 43。为了加快电池充电，请关闭测试仪。

⚠ 小心

为避免充电期间电池过热，请不要在超过技术规范中规定的许可环境温度下充电。

注意

如果长时间连接电源适配器，比如在周末期间，不会造成损坏。仪器会自动切换到涪流充电。

图 43. 给电池充电

另外，也可以选择用完全充满电的电池更换现有电池（Fluke 配件 BP290 或 BP291），然后使用外置式电池充电器 EBC290（Fluke 可选配件）给现有电池充电。

电池组更换

⚠⚠ 警告

为防止可能发生触电、火灾或人身伤害，请仅使用 **Fluke BP290**（建议不要用于 **190M-4-III**）、**BP291** 或 **Fluke** 推荐的等效电池进行更换。


未通过适配器供电时，如果在 30 秒内完成了电池更换，则未保存到测试仪存储器中的数据不会丢失。为了避免丢失数据，请在取下电池之前执行下列操作之一：

- 将数据存储到测试仪（内部非易失性闪存）、计算机或 USB 闪存盘中。
- 连接电源适配器。

若要安装或更换电池组：

1. 取下所有探针和/或测试引线。
2. 拆下支架，或将其折叠到测试仪内。
3. 松开电池盖。请参见图 44 ①。
4. 提起倾斜支架。请参见 ②。
5. 提拉电池盖，将其拆下。请参见 ③。
6. 如需更换电池，提拉电池的一侧，将其拆下。请参见 ④。
7. 安装电池，合上电池盖

图 44. 电池组更换

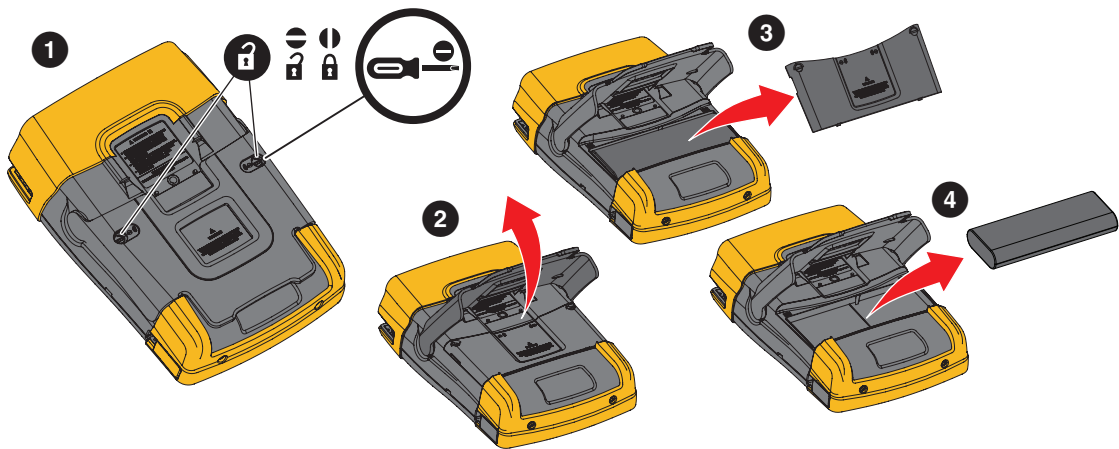

电压探针校准

为了完全满足用户技术规范，需要调整电压探针以获得最佳响应。对于 10:1 探针和 100:1 探针，校准过程包括高频调整和直流校准。校准探针可使探针与输入通道相匹配。

要校准 10:1 电压探针：

1. 按 **A** 显示“输入端口 A”键标签。

2. 按 **F3** 打开“探针开启 A”菜单。

如果已经正确地选择了探针类型（暗黄色），可以从第 5 步开始继续操作。

3. 使用光标的 **ENTER** 选择探针类型：电压和衰减：10:1。

4. 再次按 **F3** 打开“探针开启 A”菜单。

5. 按 **F1** 选择探针校准..。

注意

必须同时连接钩式夹和零基准触点。

此时会出现一条消息询问您是否要开始校准 10:1 探针。

6. 按 **F4** 开始探针校准。


此时会有一条消息告诉您如何连接探针。将红色 10:1 电压探针连接至输入端口 A 及探针校准基准信号。请参见图 45。

图 45. 电压探针调整



7. 调整探针壳中的微调螺钉，直到显示屏上显示纯方波为止。

有关如何使用探针壳中的微调螺钉，请参见探针的使用说明。

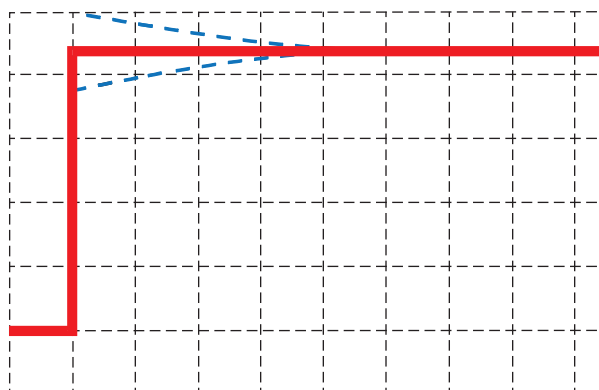

8. 按 **F4** 继续进行直流校准。对于 10:1 电压探针，只能自动进行直流校准。

测试仪会自动根据探针进行校准。校准期间，您不得接触探针。成功完成直流校准后，会显示一条消息。

9. 按 **F4** 退出。

对输入端口 B 的蓝色 10:1 电压探针、输入端口 C 的灰色 10:1 电压探针以及输入端口 D 的绿色 10:1 电压探针重复上述流程。

注意

当使用 100:1 电压探针时，选择 100:1 衰减率来执行调节。100:1 电压探针需要直流校准。不可以调整微调螺钉。

版本和校准信息

您可以显示版本号及校准日期：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F3** 打开“版本和校准”屏幕。
3. 按 **F4** 关闭屏幕。

屏幕上会显示关于型号、软件版本、序列号、校准编号、最近一次校准日期及已安装的（软件）选项等信息。按下“许可证信息”键将会打开一个屏幕，其中会显示有关开源软件许可证的信息。测试仪的技术规格是基于 1 年校准周期。必须由合格人员进行重新校准。需要重新校准时，请与当地的 Fluke 代表联系。

电池信息

电池信息屏幕将提供电池的状态及电池序列号。

要显示电池信息：

1. 按 **USER** 显示“用户”键标签。
2. 按 **F3** 打开“版本和校准”屏幕。
3. 按 **F1** 打开“电池信息”菜单。
4. 按 **F4** 返回上一屏幕。

电量是指可用电量占电池当前最大电量的百分比。**可用时间**是指估算的剩余工作时间。

替换零件

表 4 列出了各种替换零件。如需订购替换零件，请联系您的 Fluke 代表。

表 4. 替换零件

说明	部件号
通用电源适配器	BC190/830
测试引线，带触针（红黑各一）	TL175
电压探针套件（红色或蓝色或灰色或绿色）。该套件中包括以下物品（不可分开订购）： • 10:1 电压探针，500 MHz • 探针尖端的钩式夹 • 带小型鳄鱼夹的接地引线 • 探针尖端的接地簧片 • 绝缘套	VPS410-II-R（红色） VPS410-II-B（蓝色） VPS410-II-G（灰色） VPS410-II-V（绿色）
电压探针 VPS410 和 VPS410-II 的替换配件包	RS400
BNC 馈通式 50 Ω （1 瓦）端接器（一套两只，黑色）	TRM50
锂电池（26 Wh，不建议用于型号 190M-4-III）	BP290
锂电池（54 瓦时）	BP291
挂带	946769
MA190 医疗应用附件包	1567481

可选配件

表 5 列出了各种可选配件。有关更多可选配件，请访问 fluke.com.cn。要订购可选配件，请联系您的 Fluke 代表。

表 5. 可选配件

说明	部件号
电压探针套件，专为与 Fluke 190-50x 测试仪配套使用而设计。 该套件中包括以下物品（不可分开订购）： • 10:1 电压探针，500 MHz（红色或蓝色或灰色或绿色） • 探针尖端的钩式夹（黑色） • 带小型鳄鱼夹的接地引线（黑色） • 探针尖端的接地簧片（黑色） • 绝缘套（黑色） • 探针尖端转 BNC 适配器	VPS510-R（红色） VPS510-B（蓝色） VPS510-G（灰色） VPS510-V（绿色）
电压探针 VPS510 的替换套件 该套件中包括以下物品（不可分开订购）： • 1 个探针尖端的钩式夹（黑色） • 1 根带小型鳄鱼夹的接地引线（黑色） • 2 个探针尖端的接地簧片（黑色） • 2 个探针尖端的绝缘套（黑色） • 2 个探针尖端转 BNC 适配器	RS500
探针配件扩展套件：VPS410，VPS410-II 该套件中包括以下各项（不可分开订购）： • 1 个探针尖端的工业用鳄鱼夹（黑色） • 1 根 2 mm 探针尖端测试引线（黑色） • 1 根 4 mm 探针尖端测试引线（黑色） • 1 个 4 mm 香蕉插孔工业用鳄鱼夹（黑色） • 1 个 4 mm 香蕉插孔接地引线（黑色）	AS400
外置式电池充电器，使用 BC190 对 BP290/BP291 进行外部充电	EBC290
挂钩；能够将测试仪挂在柜门或隔离墙上。	HH290

表 5. 可选配件（续）

说明	部件号
50 Ω 同轴电缆，1.5 m 长，带绝缘 BNC（红色）接头（具有安全设计）。	PM9091
50 欧姆同轴电缆套件；包括 3 根电缆（1 根红色，1 根灰色，1 根黑色），0.5 m 长，带绝缘 BNC 接头（具有安全设计）。	PM9092
安全设计的 BNC T 型接头，用于将 BNC 公接头连接至两个 BNC 母接头（完全隔离）。	PM9093
BNC 馈通式 50 欧姆（1 瓦）端接器（一套两只，黑色）	TRM50
10:1 200 MHz 电压探针，2.5 m	VPS212-R（红色）， VPS212-G（灰色）
1:1 30 MHz 电压探针，1.2 m	VPS101
双香蕉插头公头转母头 BNC	PM9081

故障排除

测试仪开机后很快关机

- 电池电量可能已耗尽。检查屏幕右上角的电池符号。 表示电池电量已用尽，必须充电。连接 **BC190** 电源适配器。
- 测试仪仍处于开启状态，但显示屏自动关闭定时器处于活动状态。需要打开显示屏时，按下任意键（重新启动显示屏自动关闭定时器），或连接 **BC190** 电源适配器。
- 关机定时器处于活动状态。
- 按下开/关以打开测试仪。
- 请参见[关机定时器](#)。

屏幕仍然不亮

- 确保测试仪已打开（按下  并等待几秒钟）。
- 显示屏自动关闭定时器已激活。需要打开显示屏时，按下任意键（重新启动显示屏自动关闭定时器），或连接 **BC190** 电源适配器。
- 请参见[显示屏自动关闭定时器](#)。

测试仪无法关闭

如果由于软件问题而无法关闭测试仪，请按住开 / 关键至少 5 秒钟。

FlukeView 2 不能识别测试仪

- 确保测试仪已开机。
- 确保测试仪和 **PC** 之间的接口连接线连接正确，或者 **WiFi** 连接正确。只能使用测试仪 mini USB 端口与计算机进行通信。
- 确保没有使用 **U** 盘进行“保存/调用/复制/移动”操作。
- 确保 **USB** 驱动程序已正确安装。[USB 驱动程序](#)。

由电池供电的 Fluke 配件不工作

使用由电池供电的 **Fluke** 配件时，请始终先使用 **Fluke** 万用表检查配件的电池状况，或按照特定配件的程序进行操作。

