

ProSim™ 2/3

Vital Signs Simulator

安全に関する情報

詳細は、www.flukebiomedical.com をご覧ください。

「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

警告

感電、火災、人身への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
- 本器を、患者、または患者に接続した機器に接続しないでください。本器は機器の分析のみに使用されるよう意図されています。本器を、診断や治療、あるいは製品を患者に接触させるようなその他の用途に使用しないでください。
- 本器は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。
- 本器を長期間使用しない場合や 50 °C 以上の場所に保管する場合は、バッテリーを外してください。バッテリーが外されていないと、バッテリーの液漏れが発生し本器を損傷する可能性があります。
- バッテリー残量の低下インジケータが表示されたら、測定値が不正確になるのを防ぐために電池を交換してください。
- すべての説明に注意深く目を通してください。
- 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露のある環境、または湿気の多い場所で本器を使用しないでください。
- 本製品が損傷している場合は電源を切り、使用を中止してください。
- 作動に異常が見られる場合は使用しないでください。

- 本製品を使用する前に外装を点検してください。ひび割れやプラスチックの欠損がないことを確認してください。端子周辺の絶縁状態を十分に検査してください。
- 電池カバーを開く前に、すべてのプローブ、テスト・リード、アクセサリを取り外してください。
- バッテリーには火災や爆発の原因となる危険な化学薬品が含まれています。化学薬品に触れてしまった場合は、水で洗浄し医師の診断を受けてください。
- 本器の修理は、必ずフルークのサービスセンターにご依頼ください。
- 指定された交換部品のみを使用してください。
- 本器をクリーニングする前に、入力信号を遮断してください。
- 電池セルやバッテリー・パックを熱い場所や火の近くに置かないでください。直射日光下に放置しないでください。
- バッテリーを分解しないでください。
- 製品を長期間使用しない場合は、電池の液漏れと製品の損傷を防ぐために電池を取り外してください。
- バッテリー端子をショートさせないでください。

製品の安全な作動とメンテナンスのため、次の事項を厳守してください。

- セルとバッテリー・パックは清潔で乾燥した状態に保ってください。汚れたコネクタは乾燥した清潔な布で拭いてください。
- バッテリーの液漏れが発生した場合は、使用する前に製品を修理してください。
- 液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイナスを合わせて正しく装着してください。
- セルやバッテリーは端子がショートする可能性のある容器に入れて保管しないでください。
- バッテリーセルやバッテリーパックは分解または破壊しないでください。

安全に関する情報

電源: 9 V アルカリ電池 (IEC 6LR61、NEDA 1604A) 2本。オプションの電池エリミネーター: DC 15 V、1.5 mA

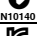
温度:

保管時: -25°C ~ +50°C

作動時: 10°C ~ 40°C

高度: 2,000 m

記号

記号	説明
	危険。重要な情報。マニュアルを参照。
	危険電圧。感電の危険性があります。
	EU指令準拠
	関連する北米の安全規格に準拠。
	関連するオーストラリア EMC 規格に準拠
	韓国の EMC 規格に準拠します。
	バッテリー
	本製品はWEEE指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリ: WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリ 9「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、分別されていない一般廃棄物として処分しないでください。リサイクルの情報については、フルークの Web サイトをご覧ください。

保証と製品サポート

Fluke Biomedical は本機器の材料の欠陥および製造上の欠陥に対して最初のご購入日から 1 年間またはご購入の最初の年末に **Fluke Biomedical** サービス・センターの校正のために送付された場合は 2 年間本機器を保証します。そのような校正に対してカスタム費用を請求します。保証期間中に問題があった場合は、お客様自身のご負担で **Fluke Biomedical** に製品をお送りいただき、不具合が認められた場合、**Fluke Biomedical** の判断において無料で修理あるいは交換いたします。この保証は、元の購入者のみに適用され、譲渡することはできません。製品の不具合が事故や誤使用が原因で発生した場合、また **Fluke Biomedical** の公認サービス施設以外の第三者による保守または改造によるものであった場合は、本保証は適用されません。特定の目的に対する適合性といった、その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。**FLUKE** 社は、なんらかの理由、または理論に起因して生ずる、いかなる特別な、間接的な損傷または損失、偶発的な損傷または損失、または必然的な損傷または損失に対し、データの損失を含んで、責任を負うものではありません。

この保証は、シリアル番号タグの付いた製品とその付属品のみに適用されます。機器の再校正は、保証に含まれておりません。

この保証はお客様に特別の法的権限を与えるもので、司法管轄区によって、その他の権限が存在する可能性があります。法管轄区によっては、示唆的保証の条件を制約すること、あるいは二次的あるいは結果として生ずる損害に対する責任の免責または限定が許されていませんので、本保証における制約および免責はすべての購入者に適用されるとは限りません。この保証のある部分が該当管轄区の裁判所やその他の法的機関によって無効または強制不可であると判断されても、その他の条項の有効性や強制力には影響しないものとします。