

FLUKE®

Biomedical

QA-ES III

Electrosurgery Analyzer

Einleitungshandbuch

PN 4473063

December 2015, Rev. 1 (German)

© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Garantie und Produktunterstützung

Fluke Biomedical gewährleistet, dass dieses Gerät für den Zeitraum von einem Jahr, ab ursprünglichem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten sein wird, bzw. für zwei Jahre, falls Sie am Ende des ersten Jahres das Messgerät zur Kalibrierung an ein Fluke Biomedical Servicezentrum einsenden. Für eine solche Kalibrierung stellen wir Ihnen die gewohnte Gebühr in Rechnung. Während des Garantiezeitraums werden wir nach eigenem Ermessen ein Produkt reparieren oder ersetzen, sollte es sich als defekt erweisen. Senden Sie in diesem Fall das Produkt mit im Voraus bezahlten Versandkosten an Fluke Biomedical. Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer und kann nicht übertragen werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt versehentlich beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder durch eine andere als die autorisierte Fluke Biomedical Servicestelle gewartet oder verändert wird. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEEN, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IMPLIZIERTER ODER AUSDRÜCKLICHER ART ABGEGEBEN. FLUKE HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.

Nur mit Seriennummern versehene Produkte und Zubehör (Produkte und Teile mit Seriennummernetikett) sind durch diese Garantie abgedeckt. Die Neukalibrierung von Messgeräten ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte, und je nach Gerichtsbarkeit verfügen Sie u. U. über weitere Rechte. Da einige keine Ausschlüsse und/oder Einschränkungen einer gesetzlichen Gewährleistung oder von Begleit- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat. Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit anderer Klauseln dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt.

Hinweise

Alle Rechte vorbehalten

©Copyright 2015, Fluke Biomedical. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Fluke Biomedical reproduziert, übertragen, aufgezeichnet, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Copyright-Übertragung

Fluke Biomedical heißt eine beschränkte Copyright-Übertragung gut, die es Ihnen ermöglicht, Handbücher und andere gedruckte Materialien für den Gebrauch in Serviceschulungsprogrammen und technischen Publikationen zu reproduzieren. Falls Sie andere Reproduktionen oder Vervielfältigungen wünschen, senden Sie ein schriftliches Gesuch an Fluke Biomedical.

Auspacken und Überprüfen

Bei Empfang des Messgeräts Standard-Annahmepraktiken befolgen. Den Versandkarton auf Beschädigung prüfen. Falls eine Beschädigung vorliegt, das Messgerät nicht weiter auspacken. Den Spediteur benachrichtigen und verlangen, dass beim Auspacken des Messgeräts ein Vertreter gegenwärtig ist. Es gibt keine besonderen Anweisungen zum Auspacken; zur Vermeidung von Beschädigung beim Auspacken des Messgeräts vorsichtig vorgehen. Das Messgerät auf offensichtliche Beschädigung wie verbogene oder gebrochene Teile, Beulen oder Kratzer untersuchen.

Technischer Kundendienst

Für Anwendungsunterstützung oder Antworten auf technische Fragen eine E-Mail an techservices@flukebiomedical.com senden oder 1-800-850-4608 bzw. (+1) 440-248-9300 anrufen. In Europa senden Sie eine E-Mail an techsupport.emea@flukebiomedical.com oder rufen Sie +31-40-2675314 an.

Ansprüche

Unsere routinemäßige Versandmethode ist via Transportunternehmer, FOB Ausgangsort. Wenn bei Auslieferung offensichtliche Beschädigung festgestellt wird, alle Verpackungsmaterialien zurückbehalten und unverzüglich das Transportunternehmen benachrichtigen, um einen Anspruch geltend zu machen. Wenn das Messgerät in äußerlich gutem Zustand ausgeliefert wird, jedoch nicht gemäß den Spezifikationen funktioniert, oder andere nicht auf Versandbeschädigung beruhende Probleme bestehen, wenden Sie sich bitte an Fluke Biomedical bzw. die zuständige Verkaufsvertretung.

Rücksendungen und Reparaturen

Rücksendeverfahren

Alle Teile und Artikel, die zurückgesendet werden (einschließlich Rücksendungen für Garantieansprüche), müssen unter Vorausbezahlung der Frachtkosten an unseren Werksstandort gesendet werden. Für Rücksendungen von Messgeräten an Fluke Biomedical empfehlen wir United Parcel Service, Federal Express oder Air Parcel Post. Darüber hinaus sollte die Sendung in der Höhe der tatsächlichen Ersetzungskosten versichert werden. Fluke Biomedical ist nicht für verlorene Sendungen verantwortlich oder für Messgeräte, die wegen nicht sachgerechter Verpackung oder Handhabung in beschädigtem Zustand ankommen.

Den ursprünglichen Karton und das ursprüngliche Verpackungsmaterial für Sendungen verwenden. Falls diese Materialien nicht verfügbar sind, sollten für die Verpackung die folgenden Richtlinien beachtet werden:

- Doppelwandigen Karton verwenden, dessen Stärke für das Gewicht des versandten Gegenstands ausreicht.
- Alle Oberflächen des Instruments mit dickem Papier oder Karton schützen. Alle vorspringenden Teile mit nicht-scheuerndem Material schützen.
- Mindestens 10 cm dick gepacktes, für industrielle Zwecke zugelassenes, stoßdämpfendes Material rund um das Instrument anbringen.

Rücksendungen für Teilerstattung/Gutschrift:

Jedem wegen einer Erstattung/Gutschrift zurückgesendeten Produkt muss eine RMA-Nummer (Return Material Authorization = Rücknahmegenehmigung) beiliegen, die von der Order Entry Group unter 1-440-498-2560 vergeben wird.

Reparatur und Kalibrierung:

Für das nächstgelegene Servicezentrum siehe www.flukebiomedical.com/service oder

In den USA und Asien:

Cleveland Calibration Lab
Tel: 1-800-850-4608 x2564
E-Mail: globalcal@flukebiomedical.com

In Europa, im Mittleren Osten und in Afrika:

Eindhoven Calibration Lab
Tel: (+31) 40-2675300
E-Mail: servicedesk@fluke.nl

Um eine hohe Genauigkeit des Produkts sicherzustellen, empfiehlt Fluke Biomedical, das Produkt mindestens einmal alle 12 Monate zu kalibrieren. Die Kalibrierung muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Wenden Sie sich für eine Kalibrierung an die zuständige Fluke Biomedical-Vertretung.

Zertifizierung

Dieses Messgerät wurde eingehend getestet und untersucht. Es wurde befunden, dass die Herstellungsspezifikationen von Fluke Biomedical zum Zeitpunkt des Versands im Werk erfüllt waren. Kalibriermesswerte sind gemäß NIST (National Institute of Standards and Technology) rückführbar. Geräte, für die es keine NIST-Kalibrierstandards gibt, werden unter Anwendung akzeptierter Testverfahren gemessen und mit internen Leistungsstandards verglichen.

WARNUNG

Nicht autorisierte Benutzermodifikationen oder Anwendung außerhalb der veröffentlichten Spezifikationen können zu Stromschlag oder fehlerhaftem Betrieb führen. Fluke Biomedical haftet nicht für jegliche Verletzungen, die auf nicht autorisierte Gerätmodifikationen zurückgehen.

Einschränkungen und Haftbarkeit

Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit verändert werden und stellen keine Verpflichtung durch Fluke Biomedical dar. Änderungen der Informationen in diesem Dokument werden in neue Ausgaben der Publikation eingearbeitet. Fluke Biomedical übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung oder Verlässlichkeit von Software oder Geräten, die nicht von Fluke Biomedical oder seinen angeschlossenen Händlern bereitgestellt wurden.

Herstellungsstandort

Der QA-ES III Electrosurgery Analyzer wird am folgenden Standort hergestellt: Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, U.S.A.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Vorgesehener Verwendungszweck	1
Sicherheitsinformationen	2
Terminologie	5
Übersicht über das Produkt	5
Das Gerät einschalten	8
Hauptmenüs	8
Messeingänge	10
Fußschalteranschlüsse	10
Nullanschlüsse	10
Einstellungen Kommunikation	11
USB-Anschluss	11
Windows-Software-Treiber	11
Gerätemanager	12
Drahtlosanschluss	13

Instandhaltung des Produkts	14
Reinigung.....	15
Fehlersuche	15
Ersatzteile	15
Zubehör	16
Allgemeine technische Daten	16
Technische Spezifikationen	17

Einführung

Der QA-ES III (oder das Produkt) misst die Leistung von Hochfrequenz-Elektrochirurgieeinheiten (= ESUs = electrosurgical units) und speichert Testaufzeichnungen, die Sie auf einen Computer (PC) übertragen können. Sie können das Produkt über das Fluke Ansur Softwareprogramm per Fernsteuerung bedienen.

Das Produkt führt folgende Messungen und Tests durch:

- Generator-Output:
 - Leistung, RMS
 - Strom, RMS
 - Spannung, Spitze zu Spitze
 - Scheitelfaktor
- Schleifenstrom Gefäßversiegelung
- HF-Leckstrom in verschiedenen Konfigurationen

- Kontaktqualitätsüberwachungstest (CQM)
- Der Energieverteilungstest führt automatisch eine Reihe an Messungen des Generator-Outputs bei verschiedenen Lasten durch.

Vorgesehener Verwendungszweck







Das Produkt ist ein Präzisionsgerät für die Durchführung von Tests an Hochfrequenz-Elektrochirurgieeinheiten nach nationalen und internationalen Standards. Das Gerät ist für den Gebrauch durch qualifizierte Servicetechniker konzipiert. Die Tests umfassen die automatische Messung der Energieverteilung, die Messung des Scheitelfaktors, die RF-Leckstrommessung und den CQM-Test (contact quality monitor, Kontaktqualitätsüberwachung). Das Produkt wird in Krankenhäusern, Abteilungen für Medizintechnik, bei unabhängigen Dienstleistungsorganisationen sowie bei ESU-OEMs eingesetzt. Das Produkt darf nicht in Patientenzimmern in Anwesenheit von Patienten verwendet werden.

Sicherheitsinformationen

Warnung kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, die für den Anwender gefährlich sind. **Vorsicht** kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

Tabelle 1 enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt oder im vorliegenden Handbuch verwendet werden.

Tabelle 1. Symbole

Symbol	Beschreibung
	Gefahr. Wichtige Informationen. Siehe Handbuch.
	Gefährliche Spannungen. Risiko von Stromschlägen.
	Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
	Entspricht den maßgeblichen nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.
	Entspricht den relevanten australischen EMV-Normen.
	Dieses Gerät entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Produkt als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

⚠⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Brand oder Verletzungen folgende Richtlinien einhalten:

- Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
- Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.
- Den Betrieb auf die angegebene Messkategorie, Spannung bzw. Nennstromstärke beschränken.
- Die für die vorzunehmenden Messungen entsprechenden Anschlüsse, Funktionen und Messbereiche verwenden.
- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Keine Spannungen > 30 V AC eff, 42 V AC Spitze oder 60 V DC berühren.
- Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Vor Verwendung des Produkts das Gehäuse untersuchen. Auf Risse oder fehlende Kunststoffteile prüfen. Insbesondere auf die Isolierung um die Buchsen herum achten.
- Die Prüflleitungen nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Untersuchen Sie die Messleitungen auf beschädigte Isolierung, frei liegendes Metall bzw. auf Sichtbarkeit der Abnutzungsanzeige. Durchgang der Messleitungen prüfen.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden.
- Ausschließlich Netzkabel und Steckverbinder verwenden, die für die Spannung und Steckerkonfiguration in Ihrem Land zugelassen und für das Gerät spezifiziert sind.
- Sicherstellen, dass der Erdleiter des Netzkabels mit einer Schutzterde verbunden ist. Durch eine Unterbrechung der Schutzterde kann eine Spannung am Gehäuse anliegen, die tödlich sein kann.
- Das Netzkabel austauschen, wenn die Isolierung beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

- Nur Stromsensoren, Messleitungen und Adapter verwenden, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind.
- Die Masseleitung immer vor der spannungsführenden Leitung anschließen und die spannungsführende Leitung immer vor der Masseleitung abklemmen.
- Nur Messfühler, Messleitungen und Zubehör verwenden, die dieselbe Messkategorie, Spannung und Nennstromstärke wie das Produkt aufweisen.
- Alle Messfühler, Testelektrodenkabel und sämtliches Zubehör entfernen, die nicht für die Messung erforderlich sind.
- Messeingänge nicht direkt an das Stromnetz anschließen.
- Die Prüfleitungen nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Die Messleitungen auf beschädigte Isolierung untersuchen und eine bekannte Spannung messen.
- Deaktivieren Sie das Produkt, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Kein freiliegendes Metall von Bananensteckern berühren; es können tödliche Spannungen anliegen.
- Zur Strommessung die Stromversorgung unterbrechen, bevor das Produkt an den Stromkreis angeschlossen wird. Das Produkt mit dem Stromkreis in Reihe schalten.
- Ein zugelassenes Dreileiter-Netzkabel an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Das Gerät nur an Orten aufstellen, an denen das Netzkabel zugänglich ist.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Produkt geerdet ist.
- Keine Metallobjekte in die Anschlüsse einführen.
- Sicherstellen, dass der Bereich um das Produkt den Mindestanforderungen entspricht.
- Den Analyzer nicht in CAT II-, CAT III- oder CAT IV-Umgebungen verwenden.
- Einziehbares Ende der Messleiter nur für Einsatz an der ESU.
- Keine mit dem Analyzer gelieferten Sonden bzw. kein Zubehör sind für die handgehaltene Nutzung konzipiert. Beim Aktivieren der ESU mit dem Fußschalter die ESU einrichten und zurückschreiten.

Terminologie

Für dieses Produkt wird folgende Terminologie gemäß IEC 60601-2-2 verwendet:

- HF – Hochfrequenzchirurgiesignale, auch als RF (Radiofrequenz) bezeichnet.
- Neutralelektrode, auch als Dispersiv-Elektrode bezeichnet.
- Kontaktqualitätsüberwachung (CQM), auch als Neutralelektrodenüberwachung (REM markenrechtlich geschützt von Covidien) oder Neutralelektroden-Stromüberwachung (RECM) bezeichnet.

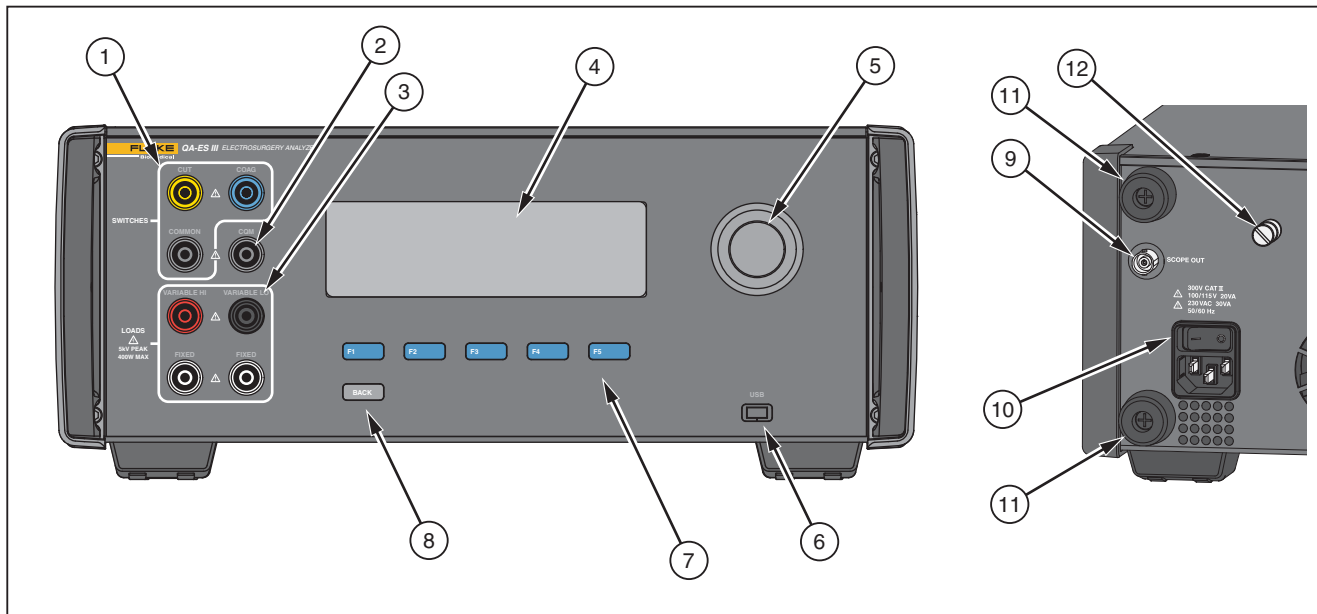
Alle Artikel sorgfältig aus der Schachtel herausnehmen und prüfen, ob folgende Artikel vorhanden sind:

- QA-ES III Electrosurgery Analyzer
- Bedienungshandbuch auf CD
- Einleitungshandbuch
- Krokodilklemmen, schwarz und rot
- Dispersive Sicherheitsmessleitung
- CQM-Sicherheitsmessleitung

- Jumper-Sicherheitsmessleitung (Überbrückungskabel)
- 1 m (40 Zoll) anreihbare/einziehbare Sicherheitsmessleitungen, schwarz, rot (2), blau, gelb und grün
- 0,5 m (20 Zoll) anreihbare/einziehbare Sicherheitsmessleitungen, schwarz und rot
- Stapelbare Anschlusskabel mit Bananensteckern, 4 mm, schwarz
- Ausschaltleitung für RECM-Alarm
- Bipolare Einschaltleitung
- USB-Kabel
- CD-ROM mit Ansur Software

Übersicht über das Produkt

In Abbildung 1 und Tabelle 2 werden die Bedienelemente und die Anschlüsse des Produkts beschrieben.



hwg001.eps

Abbildung 1. Bedienelemente und Anschlüsse des Produkts

Tabelle 2. Bedienelemente und Anschlüsse

Nr.	Beschreibung
①	Fußschalteranschlüsse: CUT (Schnitt), COAG (Koagulation), COMMON (gemeinsam)
②	CQM-Anschluss für die Prüfung der Kontaktqualitätsüberwachung.
③	Lastanschlüsse: VARIABLE HI (wechselnd hoch), VARIABLE LO (wechselnd niedrig), FIXED (Festlast)
④	LCD
⑤	Drehwahlknopf
⑥	USB-Anschluss
⑦	Funktionstasten (F1 bis F5)
⑧	BACK -Taste (Zurück)
⑨	Scope out (Oszilloskop-Ausgang)
⑩	Netzanschluss und An-/Aus-Schalter
⑪	Gummistopper zum Schutz der Rückseite
⑫	Erdungsöse

Das Gerät einschalten

Vor dem Einschalten des Produkts auf Schäden oder Verschleißerscheinungen überprüfen. Auf adäquate Belüftung überprüfen. Das Produkt erfordert einen Freiraum von 10 cm (4 Zoll) auf der Rückseite und vor allen Lüftungsöffnungen.

Das Stromkabel ans Netz anschließen und den Einschaltknopf drücken. Die Startsequenz beginnt.

Während der Startsequenz zeigt ein Bildschirm die Firmware-Version zur Referenz. Sie können die Startsequenz zur Aktualisierung der Firmware nutzen.

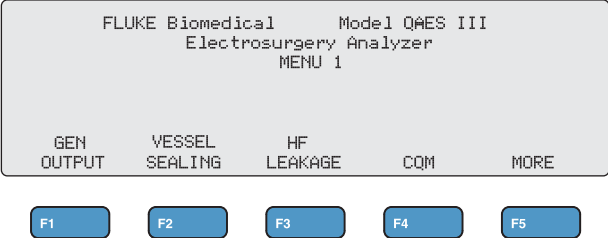
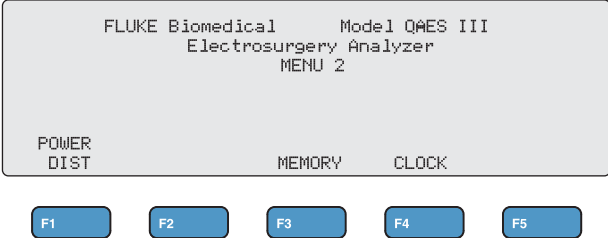
Nach der Startsequenz startet das Produkt die Anwendung. Wenn der Hauptmenü-Bildschirm erscheint, ist das Produkt einsatzbereit.

Hauptmenüs

Die Hauptmenüs 1 und 2 haben Untermenüs zur Durchführung von Messungen, für die Geräteeinstellung und zur Wartung des Speichers. Die Auswahl aus den Menüs erfolgt über die Bedienelemente und Softkeys. Tabelle 3 beschreibt die Bedienelemente des Hauptmenüs.

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie im Bedienungshandbuch auf der beigefügten CD. Die Handbücher finden Sie auch unter www.flukebiomedical.com.

Tabelle 3. Bedienelemente des Hauptmenüs

 <p>hwg002.eps</p>		 <p>hwg003.eps</p>	
Softkey	Führt zum	Softkey	Führt zum
F1	Messmenü „Generator-Output“	F1	Messmenü „Energieverteilung“
F2	Messmenü „Gefäßversiegelung“	F2	--
F3	Messmenü „HF-Leckstrom“	F3	Menü „Speicher“
F4	Menü „CQM-Test (Test Kontaktqualitätsüberwachung)“	F4	Menü „Uhr“
F5	Hauptmenü 2 für weitere Funktionen	F5	--
<p style="text-align: center;"><i>Hinweis</i></p> <p>Mit der Taste BACK (Zurück) zu Hauptmenü 1 zurückkehren.</p>			

Messeingänge

Die ESU zum Durchführen von Messungen an das Produkt anschließen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Fußschalteranschlüsse

Bei einigen ESUs wird der ESU-Generator mittels Fußschalter eingeschaltet. Das Produkt hat Anschlüsse, die einen Fußschalter simulieren. Mit der Fußschalterfunktion lässt sich der ESU-Generator zu einem geeigneten Zeitpunkt automatisch einschalten.

Hinweis

Alternativ zum Fußschalter nutzen einige ESUs einen Handschalter. In diesem Handbuch werden sowohl Hand- als auch Fußschalter als Fußschalter bezeichnet.

Es ist nicht praktisch, eine Einzelmessung oder einen Energieverteilungstest ohne die Fußschalterfunktion durchzuführen. Ohne diese Funktion muss die ESU zum richtigen Zeitpunkt nach dem Verzögerungsstart manuell eingeschaltet werden (oder es muss ein echter Fuß- oder Handschalter verwendet werden).

Das Produkt hat Anschlüsse für die Fußschalter CUT-Buchse (Schnitt, gelb) und COAG-Buchse (Koagulation, blau) sowie eine Anschlussbuchse COMMON (gemeinsam, grau).

Die Fußschalter-Funktion ist während aller Messungen und CQM-Tests verfügbar. Im kontinuierlichen Messmodus aktiviert das Produkt die Fußschalterrelais zum Einschalten der ESU. Die ESU bleibt eingeschaltet, und der Fußschalter wird betätigt, bis Sie die Messung stoppen.

Wenn die Fußschalterfunktion nicht genutzt wird, müssen die Fußschalteranschlüsse ignoriert werden.

Nullanschlüsse

ESUs mit CQM-Alarmen haben zwei Nullanschlüsse. Für die Messungen von Generator-Output, Gefäßversiegelung und HF-Leckstrom müssen die Nullanschlüsse gemeinsam angeschlossen werden.

Die mitgelieferten Überbrückungskabel haben einen Widerstand, der niedrig genug ist, um einen Alarm an der ESU zu verhindern. Bei einigen ESUs muss das Überbrückungskabel einen Mindestwiderstand und einen Maximalwiderstand aufweisen. Ein einfacher Jumper funktioniert möglicherweise nicht. Die Überbrückungskabel werden für alle Messungen außer für die CQM-Tests verwendet.

Einstellungen Kommunikation

Das Produkt verfügt über einen USB-Anschluss für die Kommunikation mit einem Computer (PC). Einige Produkte bieten auch Drahtlosfunktionalität. Mit den Kommunikationsanschlüssen können Sie:

- Gespeicherte Testprotokolle an einen PC senden.
- Befehle senden und Antworten empfangen, um das Produkt per Fernsteuerung zu bedienen.

Mit Ansur oder einem Terminalemulationsprogramm (zum Beispiel HyperTerminal oder Tera Term) die COM-Anschlussoptionen einstellen. Die COM-Anschlusseinstellungen sind:

- 115,200 Baud
- Keine Parität
- 8 Daten-Bits
- 1 Stoppbit
- Hardware-Handshake ist eingeschaltet. (Das Produkt nutzt Hardware-Handshaking, aber kein XON/XOFF-Software-Handshaking).

Betriebssystemanforderungen:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8 oder höher

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss des Produkts (Mikrostecker Typ B) lässt sich mit einem USB-Controller-Anschluss des PCs (rechteckiger Stecker Typ A) verbinden. Mit dem mitgelieferten USB Typ A-zu-Mikro B-Kabel das Produkt an einen PC anschließen.

Der USB-Anschluss ist am PC zu sehen, solange das Kabel an das Produkt angeschlossen ist (auch, wenn das Produkt abgeschaltet ist). Wenn das Kabel getrennt wird, muss der PC den Anschluss schließen und die Verbindung neu aufbauen.

Windows-Software-Treiber

Der USB-Anschluss nutzt einen integrierten Schaltkreis (IC), um USB zu RS232 umzuwandeln. Adapterkabel nutzen oft diesen IC (FT232R des Unternehmens FTDI). Wenn das Produkt zum ersten Mal an einen PC angeschlossen wird, registriert der PC das Produkt als virtuellen COM-Anschluss (VCP). Der virtuelle COM-Anschluss sieht aus wie ein serielles (RS232-)Gerät.

Der IC ist kompatibel mit den Hochgeschwindigkeits-Spezifikationen der USB-Version 2.0. Die USB-ID-Nummern sind: VID 0403 und PID 6001.

Gerätemanager

Der Gerätemanager ist ein Computerprogramm, das die COM-Anschluss-Einstellungen ändert. Normalerweise gelangt man je nach Betriebssystem mit einer dieser Methoden zum Gerätemanager:

- Unter **Control Panel** (Systemsteuerung) **Device Manager** (Gerätemanager) wählen.
- **Hardware and Sound** (Hardware und Sound) wählen, und dann unter **Devices and Printers** (Geräte und Drucker) **Device Manager** (Gerätemanager) wählen.

Tabelle 4 beschreibt die Funktionen des Geräte-Managers.

Hinweis

Während der Geräte-Manager auf dem PC die COM-Anschlussoptionen einstellt, überschreibt das Steuerprogramm die Einstellungen des Geräte-Managers.

Tabelle 4. COM-Anschluss-Bedienelemente

Funktion	Stufen
Treiberaktivierung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf USB Serial Converter (USB-Seriell-Wandler) rechtsklicken und Properties Advanced (Eigenschaften Erweitert) wählen. 2. Load VCP (VCP laden) wählen und auf OK klicken. 3. Auf OK klicken. Der COM-Anschluss zeigt den Gerätetreiber an.

Tabelle 4. COM-Anschluss-Bedienelemente (Forts.)

Funktion	Stufen
Überprüfung der COM-Anschlusseinstellungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf COM Port (COM-Anschluss) rechtsklicken. 2. Port Settings (Anschlusseinstellungen) wählen und die Einstellungen prüfen
Änderung der von Windows zugewiesenen COM-Anschlussnummer:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf USB Serial Port (COMx, serieller USB-Anschluss) rechtsklicken und Properties Port Settings Advanced (Eigenschaften Anschlusseinstellungen Erweitert) wählen. 2. Die Nummer aus dem Menü COM Port Number (COM-Anschlussnummer) wählen und auf OK klicken. 3. Auf Hardware-Veränderungen scannen. Die Geräteliste zeigt die neue COM-Anschlussnummer an. <p>Wenn die COM-Anschlussnummer verwendet wird, könnte die Nummer einem unbenutzten Gerät zugewiesen werden. Durch die Fehlermeldung klicken, um diese Nummer zu verwenden.</p>

Drahtlosanschluss

Bei Produkten mit Drahtlosfunktionen kommuniziert der Drahtlosanschluss mit einem PC, der mit einer 802.15-Drahtlosschnittstelle (Bluetooth) ausgestattet ist. Bei PCs ohne diese Schnittstelle einen kommerziell erhältlichen USB-Adapter verwenden. Der PC startet die Schnittstelle, wenn der Adapter angeschlossen wird. (Es ist keine zusätzliche Software erforderlich).

Der Drahtlosanschluss ist am PC zu sehen, solange das Produkt eingeschaltet ist. Wenn das Produkt ausgeschaltet wird, schließt der PC den Anschluss. Wenn das Drahtlosgerät einem COM-Anschluss zugewiesen ist, wird der COM-Anschluss wieder geöffnet, sobald das Produkt wieder eingeschaltet wird.

Hinweis

Der Drahtlosanschluss des Produkts ist ein klassischer Bluetooth-Anschluss und kein energiesparender Bluetooth Anschluss.

So installieren Sie ein Drahtlosgerät:

1. Auf das Symbol für Bluetooth-Geräte rechtsklicken und **Add a Device** (Gerät hinzufügen) wählen, oder **Show Bluetooth Devices | Add a Device** (Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen | Gerät hinzufügen) wählen. Das Produkt wird im Fenster angezeigt. Die Seriennummer des Produkts ist Teil des Namens.

Hinweis

Es ist in Ordnung, wenn das Symbol ein Kopfhörer ist, oder wenn der Name Bluetooth headset (Bluetooth-Headset) lautet. Dies sind Standardeinstellungen und der Name ändert sich je nach Produkt.

2. Das Produkt wählen, und auf **Next** (Weiter) klicken. Sie werden vom System aufgefordert, die Codes zu vergleichen. Die Meldung ignorieren und mit dem nächsten Schritt fortfahren.
3. Sicherstellen, dass **Yes** (Ja) gewählt wird und auf **Next** (Weiter) klicken.
4. **Driver Software Installation** (Treibersoftwareinstallation) wählen. Das System installiert zwei COM-Anschlüsse für standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindungen. Das Bluetooth-Peripheriegerät fällt aus. Die Meldung ignorieren, und das Fenster schließen. Das Fenster „Add a device“ (Gerät hinzufügen) zeigt an, dass das Gerät erfolgreich zum Computer hinzugefügt wurde.
5. Das Fenster „Add a device“ (Gerät hinzufügen) schließen.
6. Auf das Bluetooth-Symbol rechtsklicken, und **Show Bluetooth Devices** (Bluetooth-Geräte anzeigen) wählen. Es wird der Produktname (einschließlich Seriennummer) angezeigt. Die Meldung über den fehlenden Treiber für das Bluetooth-Peripheriegerät ignorieren.
7. Auf das Produkt rechtsklicken, und **Properties** (Eigenschaften) wählen. Der Abschnitt „Hardware“ zeigt einen COM-Anschluss für eine standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung an. Diesen ausgehenden COM-Anschluss für die Schnittstelle verwenden. Die COM-Anschlüsse für die Bluetooth-Einstellungen zeigen an, dass das Produkt 2 COM-Anschlüsse hat: Outgoing (Ausgehend, vom PC initiiert) und Incoming (Eingehend, vom Produkt initiiert). Das System nutzt ausschließlich den ausgehenden Anschluss.

Drahtloseinstellungen – Für Produkte mit Drahtlosfunktionen zeigt Tabelle 5 die Einstellungen. Die Standardeinstellungen müssen nicht geändert werden. Eine Methode zum Öffnen der Bluetooth-Einstellungen wählen:

- Auf das Bluetooth-Symbol rechtsklicken, und **Open Settings** (Einstellungen öffnen) wählen.
- Auf **Bluetooth** (Bluetooth) aus dem Startmenü rechtsklicken.
- Wenn ein Adapter installiert ist, **Control Panel | Devices and Printers** (Systemsteuerung | Geräte und Drucker) wählen, dann auf den Adapter rechtsklicken und **Bluetooth Settings** (Bluetooth-Einstellungen) wählen.

Tabelle 5. Bluetooth-Einstellungen

Option	Empfohlene Einstellung
Die Verbindung von Bluetooth-Geräten mit diesem Computer zulassen.	Ausgewählt (erforderlich)
Warnung anzeigen, wenn ein neues Bluetooth-Gerät versucht, sich zu verbinden.	Ausgewählt
Das Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen.	Ausgewählt
Zulassen, dass Bluetooth-Geräte diesen Computer finden.	Nicht ausgewählt (Der PC nutzt den ausgehenden COM-Port, um das Produkt zu finden).

Instandhaltung des Produkts

⚠⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Brand oder Verletzungen folgende Richtlinien einhalten:

- **Keine Verlängerungsschnur und keinen Adapterstecker verwenden.**
- **Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Abdeckungen entfernt wurden oder das Gehäuse geöffnet ist. Anderenfalls kann es zum Berühren gefährlicher Spannungen kommen.**
- **Vor dem Entfernen der Abdeckungen des Produkts das Netzkabel und die Eingangskabel trennen.**
- **Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts alle Eingangsleitungen vom Produkt.**
- **Nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.**
- **Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten Techniker reparieren.**

Starten Sie nach der Fehlerbehebung oder Instandhaltung das Produkt neu, und stellen Sie sicher, dass es fehlerfrei hochfährt.

Informationen zur Hochfrequenzertifizierung finden Sie unter www.flukebiomedical.com.

Reinigung

Vorsicht

Für einen sicheren Betrieb des Geräts:

- **Reinigungslösungen oder Wasser nicht direkt auf das Produkt sprühen.**
- **Keine Flüssigkeiten über das Produkt gießen oder tropfen lassen.**

Das Produkt erfordert wenig Instandhaltungsarbeiten bzw. spezielle Pflege. Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Fehlersuche

Tabelle 6 zeigt mögliche Probleme und Lösungen.

Tabelle 6. Fehlersuche

Symptom	Auflösung
Das Produkt zeigt das Hauptmenü nicht an.	Sicherstellen, dass das Produkt ans Netz angeschlossen ist.
Das Produkt fällt während des anfänglichen Selbsttests aus.	Den technischen Support von Fluke Biomedical kontaktieren.
Der Zeitstempel auf den gespeicherten Protokollen stimmt nicht exakt.	Die Uhr einstellen und dann das Produkt einschalten. Mindestens für 1 Stunde eingeschaltet lassen.

Ersatzteile

Tabelle 7 enthält die austauschbaren Teile des Produkts.

Tabelle 7. Ersatzteile

Nr.	Teilenummer Fluke Biomedical
AC285 große Krokodilklemmen, schwarz, rot	1610159
ESU-Dispersive Sicherheitsmessleitung	4635167
ESU-CQM Sicherheitsmessleitung	4635171
ESU-Jumper Sicherheitsmessleitung	2772209
Micro-USB-Kabel (2 m)	4114833
1 m (40 Zoll) Sicherheitsmessleitungen, schwarz, rot (anreihbar/einziehbar)	2772159
1 m (40 Zoll) blaue Sicherheitsmessleitung (anreihbar/einziehbar)	4635180
1 m (40 Zoll) gelbe Sicherheitsmessleitung (anreihbar/einziehbar)	4635198
1 m (40 Zoll) grüne Sicherheitsmessleitung (anreihbar/einziehbar)	4635209

Tabelle 7. Auswechselbare Teile (Forts.)

Nr.	Teilenummer Fluke Biomedical
0,5 m (20 Zoll) schwarze Sicherheitsmessleitung (anreihbar/einziehbar)	4635211
0,5 m (20 Zoll) rote Sicherheitsmessleitung (anreihbar/einziehbar)	4635227
1 m (40 Zoll) schwarze Sicherheitsmessleitung (anreihbar)	4635230
Stapelbare Anschlusskabel mit Bananensteckern, 4 mm	4605232
Ausschaltleitung für RECM-Alarm	4635253
Bipolare Einschaltleitung	4635266

Zubehör

Tabelle 8 listet optionales Zubehör auf.

Tabelle 8. Liste des optionalen Zubehörs

Nr.	Teilenummer Fluke Biomedical
Internationale dispersive Leitung (1/4 Zoll-Phonostecker)	4635248
Messsondenset, 0,080 Messingspitze	1909216
Ansurs QA-ES MK III Plug-in-Lizenz	4704312

Allgemeine technische Daten

Physikalisch

Gehäuse Metallgehäuse
 Abmessungen (H x B x L) ... 14,5 cm x 35 cm x 47 cm
 (5,75 x 13,75 x 18,5 Zoll)
 Gewicht 7,5 kg (16,5 lbs)

Stromversorgung

Strombedarf 100 V AC, 115 V AC, 230 V AC,
 50 Hz/60 Hz, Universaleingang
 100 V/115 V: 20 VA
 230 V: 30 VA

Bedieneroberfläche

LCD Monochrom 240 Pixel x 64 Pixel,
 8 Zeilen x 40 Zeichen, weiße LED-
 Hintergrundbeleuchtung
 Tasten 6 (1 fest, 5 Soft, definiert) und
 Drehwahlknopf

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Betrieb 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
 Lagerung -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

Feuchtigkeit 10 % bis 90 %, nicht
 kondensierend

Höhenlage Maximal 2000 m

IP-Schutzart IEC60529:IP20

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

IEC 61326-1: Grundlegend

Emissions-

Klassifizierung IEC CISPR 11: Group 1, Klasse A.

Group 1: verfügt über absichtlich erzeugte und/oder nutzt über Leiter eingekoppelte Hochfrequenzenergie, die für die internen Funktionen des Geräts selbst notwendig ist. Klasse A: Das Gerät ist geeignet für die Anwendung außerhalb von Wohnbereichen bzw. für den direkten Anschluss an ein Niederspannungsstromversorgungsnetz.

USA (FCC) Intendierte Strahlung

Das Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschrift. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die eventuell unerwünschten Betrieb verursachen. (15.19)

Nicht von Fluke genehmigte Änderungen oder Modifikationen können zum Verlust der Betriebszulassung des Geräts führen. (15.21)

Sicherheit

IEC 61010-1: Überspannungskategorie II,
Verschmutzungsgrad 2

IEC 61010-2-030: Messung 5.000 V

Zulassung des Drahtlosmoduls

FCC-konform (Vereinigte Staaten)
(Klasse A) FCC ID: X3ZBTMOD3

IC-konform
(Industry Canada) IC: 8828A-MOD3

CE-zertifiziert

(europäisch) CE0051

Technische Spezifikationen

Die Spezifikationen gelten für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr nach der letzten Kalibrierung.

Maße Kurven für Cut (Schnitt) und coag
(Koagulation)
Monopolar- und Bipolar-Ausgänge

Messung von
Leistung und Strom echte RMS

Bandbreite 30 Hz bis 5MHz bei -3 dB
einschließlich Lasten

Verzögerungszeit für
Einzelmessungen 0,2 Sekunden bis 4,0 Sekunden
von der Fußschalteraktivierung bis
zum Messungsstart.

Tastgrad

Wechselnde Last 10 Sekunden ein, 30 Sekunden
aus, bei 100 W, alle Lasten

200 Ω Festlast 10 Sekunden ein, 30 Sekunden
aus, bei 400 W

Generator-Output-Messungen

Lastwiderstand

Wechselnd 0 Ω , 10 Ω , 20 Ω , 25 Ω bis 2500 Ω
(25 Ω -Schritte), 2500 Ω bis
5200 Ω (100 Ω -Schritte)

Genauigkeit $\pm 2,5 \%$

Stromversorgung

Bereiche.....	0,0 W bis 99,9 W 100 W bis 500 W
Genauigkeit	< 10 W: $\pm 5\%$ + 1 W ≥ 10 W: $\pm 5\%$
Maximal	
Bei 25 % Tastgrad (10 Sekunden ein, 30 Sekunden aus)	10 Ω : 300 W 20 Ω bis 2900 Ω : 400 W 3000 Ω bis 5200 Ω : 200 W
Bei 10% Tastgrad (5 Sekunden ein, 45 Sekunden aus)	10 Ω : 300 W 20 Ω bis 2400 Ω : 500 W 2425 Ω bis 2900 Ω : 400 W 3000 Ω bis 5200 Ω : 200 W

Strom

RMS	0 mA bis 5500 mA
Ungenauigkeit	$\pm (2,5\% \text{ des Anzeigewerts} + 1 \text{ mA})$

Spannung

Spitze	10 kV von Spitze zu Spitze
Genauigkeit	$\pm (10\% \text{ des Anzeigewerts} + 50 \text{ V})$

Scheitelfaktor

1,4 bis 16,0
Definiert als das Verhältnis Spitzenspannung zu RMS-Spannung (V_{sp}/V_{rms}), unter Verwendung der größeren der 2 Spitzen (positiv oder negativ)

Gefäßversiegelungsmessung

Schleifenstrom, RMS	0 mA bis 5500 mA
Genauigkeit	$\pm (2,5\% \text{ des Anzeigewerts} + 1 \text{ mA})$

HF-Leckstrom

Festlast	200 Ω
Lastgenauigkeit	$\pm 2,5\%$
Nennleistung.....	400 W
Zusätzliche Festlast.....	200 Ω
Strom, RMS	0 mA bis 5500 mA
Genauigkeit	$\pm (2,5\% \text{ des Anzeigewerts} + 1 \text{ mA})$

CQM-Test (Kontaktqualitätsüberwachung)

Widerstände	0 Ω bis 475 Ω (1 Ω -Schritte)
Widerstände.....	0 Ω bis 10 $\Omega \pm 0,5 \Omega$, 11 Ω und mehr $\pm 5\%$
Nennleistung	0,5 W
Autom. Zeitintervall	1 Sekunde bis 5 Sekunden

Oszilloskop-Ausgang

1 V pro Ampere Eingangsstrom, typisch.

Fußschaltersimulationen

Cut (Schnitt) und Coag (Koagulation)

Kommunikation

USB-Anschluss	Micro-B-Anschluss Höchstgeschwindigkeit
Drahtlosanschluss	802.15, Geschwindigkeit: 115.200 Baud

Speicher

Testprotokolle	5.000
Permanent	Erhalt durch Hochfahren

Kalibrierung

Durch entsprechende nationale Metrologieinstitute wie NIST oder durch intrinsische Standards auf das internationale System der Einheiten (SI) rückführbar.